

## Tables d'examen High-Low et High-Low PLUS

### Manuel d'installation et d'utilisation


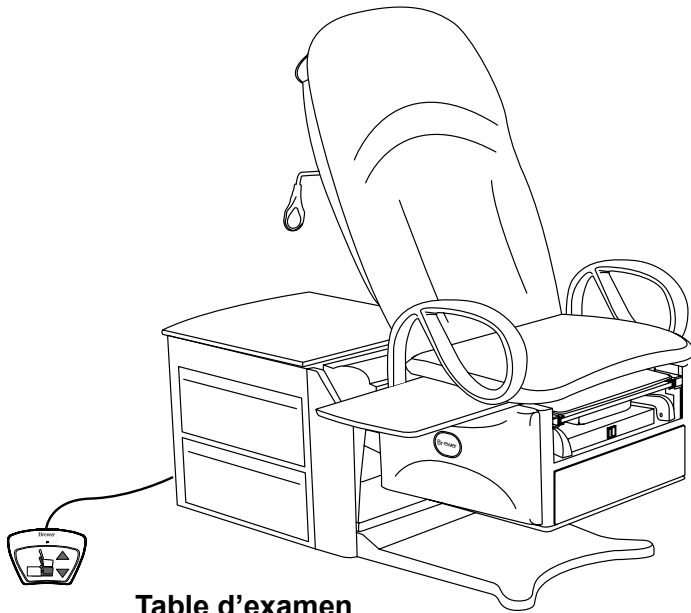


Table d'examen  
High-Low

Table d'examen  
High-Low PLUS

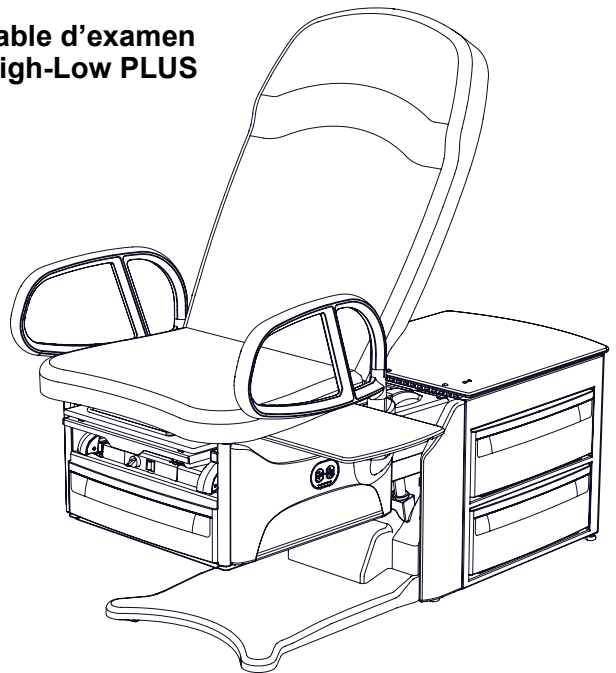

Sécurité .....	2
Information importante.....	3
Identification des composants .....	5
Caractéristiques.....	6
Installation .....	8
Fonctionnement.....	16

Entretien .....	29
Service après-vente.....	30
Accessoires .....	31
Modèles de cordon d'alimentation .....	31
Garantie.....	32

Votre produit Brewer est facile à enregistrer.

Il suffit d'aller à la page [brewercompany.com/warranty-registration](http://brewercompany.com/warranty-registration), de remplir les champs d'information et de cliquer sur SUBMIT pour envoyer. En enregistrant votre produit aujourd'hui, vous protégez mieux votre investissement à l'avenir.

**The Brewer Company, LLC**  
 N88 W13901 Main Street, Suite 100  
 Menomonee Falls, WI 53051, États-Unis  
 T 1.888.Brewer.1  
 F 262.251.2332  
 C [customerservice@brewercompany.com](mailto:customerservice@brewercompany.com)  
[www.brewercompany.com](http://www.brewercompany.com)




## SÉCURITÉ

### Sécurité

La sécurité des patients et du personnel soignant lors de l'utilisation et l'entretien de ce matériel est la principale préoccupation de The Brewer Company. Pour assurer un fonctionnement sécuritaire et fiable :

- Veiller à lire et comprendre toutes les instructions de ce manuel avant de tenter d'installer ou d'utiliser ce produit.
- Veiller à ce que le personnel concerné soit informé du contenu du manuel. C'est une responsabilité qui incombe à l'acheteur.
- Veiller à conserver ce manuel à proximité de la table ou, si possible, attaché de façon permanente à la table.

### Symboles

	<b>Le triangle jaune à bord noir et symbole noir avertit d'une situation dangereuse.</b>
	<b>Le cercle bleu à symbole blanc indique une action obligatoire pour éviter de créer une situation dangereuse.</b>
	<b>L'anneau rouge à barre diagonale et symbole noir interdit une action susceptible de créer une situation dangereuse.</b>

### Définitions

- **AVERTISSEMENT** indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer la mort ou des blessures graves.
- **ATTENTION** indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer des blessures mineures ou modérées.
- **AVIS** indique une situation sans risque de blessure physique qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer des dommages au produit ou des dégâts matériels.



Consulter le manuel



Mettre à la masse (terre)



Débrancher de la prise électrique



Fabricant



Date de fabrication



Partie appliquée de type B



Risque de choc électrique



Risque de chute



Risque d'explosion



Risque d'incendie



Risque de pincement



Risque de trébuchement



Risque d'abaissement du dossier



Démarrage automatique



Ne pas pousser



Ne pas s'asseoir



Ne pas marcher dessus

## INFORMATION IMPORTANTE

### Généralités

Veiller à lire et comprendre toutes les instructions d'utilisation, l'information sur la sécurité et les exigences d'entretien figurant dans ce manuel avant d'utiliser la table. Se familiariser avec toutes les fonctions de la table avant de l'utiliser avec un patient.

Les tables d'examen Brewer Access High-Low (modèles série 6000) et Access High-Low PLUS (modèles série 6000PLUS) sont conçues pour assurer le placement et le soutien des patients lors d'examens généraux effectués par des professionnels de la santé qualifiés.

Les tables d'examen Brewer Access High-Low et High-Low PLUS s'utilisent principalement dans les salles d'examen pour des examens généraux et des interventions mineures. Elles offrent une grande variété de positions au moyen d'un ou deux mouvements motorisés et d'un repose-jambes coulissant, ce qui en fait des tables de positionnement sécuritaires et pratiques pour le cabinet médical.

Les deux tables sont faciles à régler dans toutes les positions à l'aide de la pédale de commande pratique fournie avec la table. La hauteur de la table est réglable de 46 cm à 94 cm (18 po à 37 po). La surface d'assise des modèles 6001, 6501, 6801, 6001PLUS, 6501PLUS et 6801PLUS peut être inclinée de sa position horizontale normale jusqu'à un angle de 5°. Le dossier est réglable de la position allongée à plat jusqu'à un angle de 80° pour s'asseoir.

Les tables d'examen Brewer Access High-Low PLUS peuvent être équipées de l'option de mobilité SafeGlide™. Cela permet au personnel médical de déplacer plus facilement la table dans la salle d'examen.

En plus des positions commandées décrites ci-dessus, plusieurs réglages manuels sont possibles :

- Le repose-jambes SafeGlide peut être tiré jusqu'à une longueur de 46 cm (18 po) pour placer le patient en décubitus ventral.
- Les étriers peuvent être placés manuellement dans une infinité de positions en longueur et quatre positions latérales.
- Un bac de traitement amovible, à utiliser durant les examens, est intégré sous le coussin du repose-jambes.
- Les poignées d'assistance attachées de chaque côté de la table peuvent être tournées ou retirées pour faciliter l'accès au patient.
- Un plan de travail traversant, rangé sous l'assise, peut être tiré d'un côté ou de l'autre de la table.
- Des tiroirs de rangement sur l'avant et le côté de la table peuvent être utilisés pour les fournitures. Les tiroirs latéraux traversants peuvent être tirés d'un côté ou de l'autre de la table.
- Un compartiment à couvercle à l'arrière de la table est prévu pour le rangement des rouleaux de papier.

**INFORMATION IMPORTANTE (SUITE)**

**Service après-vente**

Pour tout besoin d'assistance concernant l'installation ou le fonctionnement de la table Brewer, appeler le service clientèle de Brewer au **1-800-558-8777**. Notre personnel qualifié fera son possible pour vous aider à résoudre le problème directement par téléphone. Si une intervention est nécessaire, un technicien agréé par le fabricant peut être envoyé sur place.

Veiller à compléter l'information ci-dessous afin de l'avoir à disposition avant d'appeler The Brewer Company ou son distributeur pour toute question concernant le produit. Voir l'emplacement du numéro de modèle et du numéro UDI à la Figure 1.

Date d'achat \_\_\_\_\_


Numéro UDI \_\_\_\_\_

Numéro de modèle \_\_\_\_\_

Nom du revendeur autorisé \_\_\_\_\_


Numéro de téléphone du revendeur \_\_\_\_\_

Adresse du revendeur \_\_\_\_\_

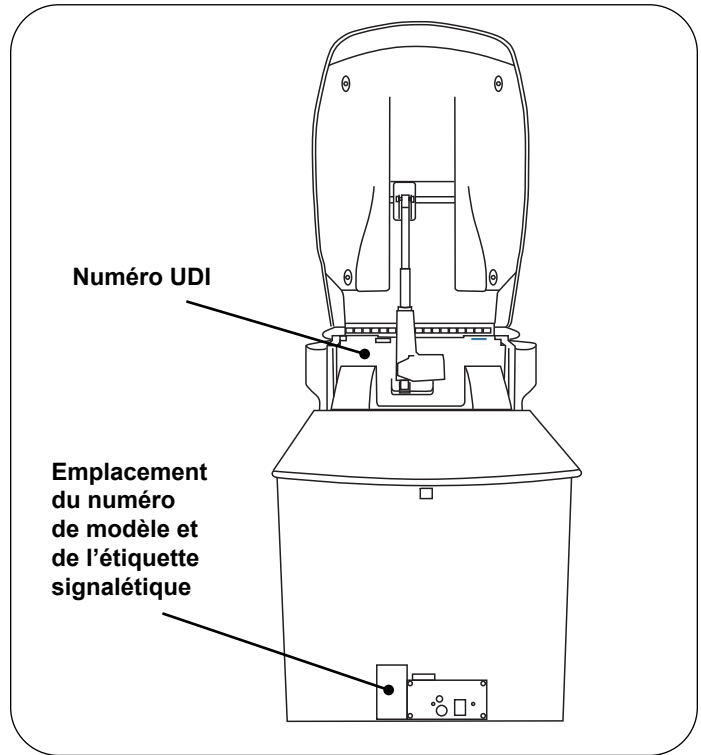

**Figure 1. Emplacement du numéro de modèle, du numéro UDI et de l'étiquette signalétique**

**IDENTIFICATION DES COMPOSANTS**

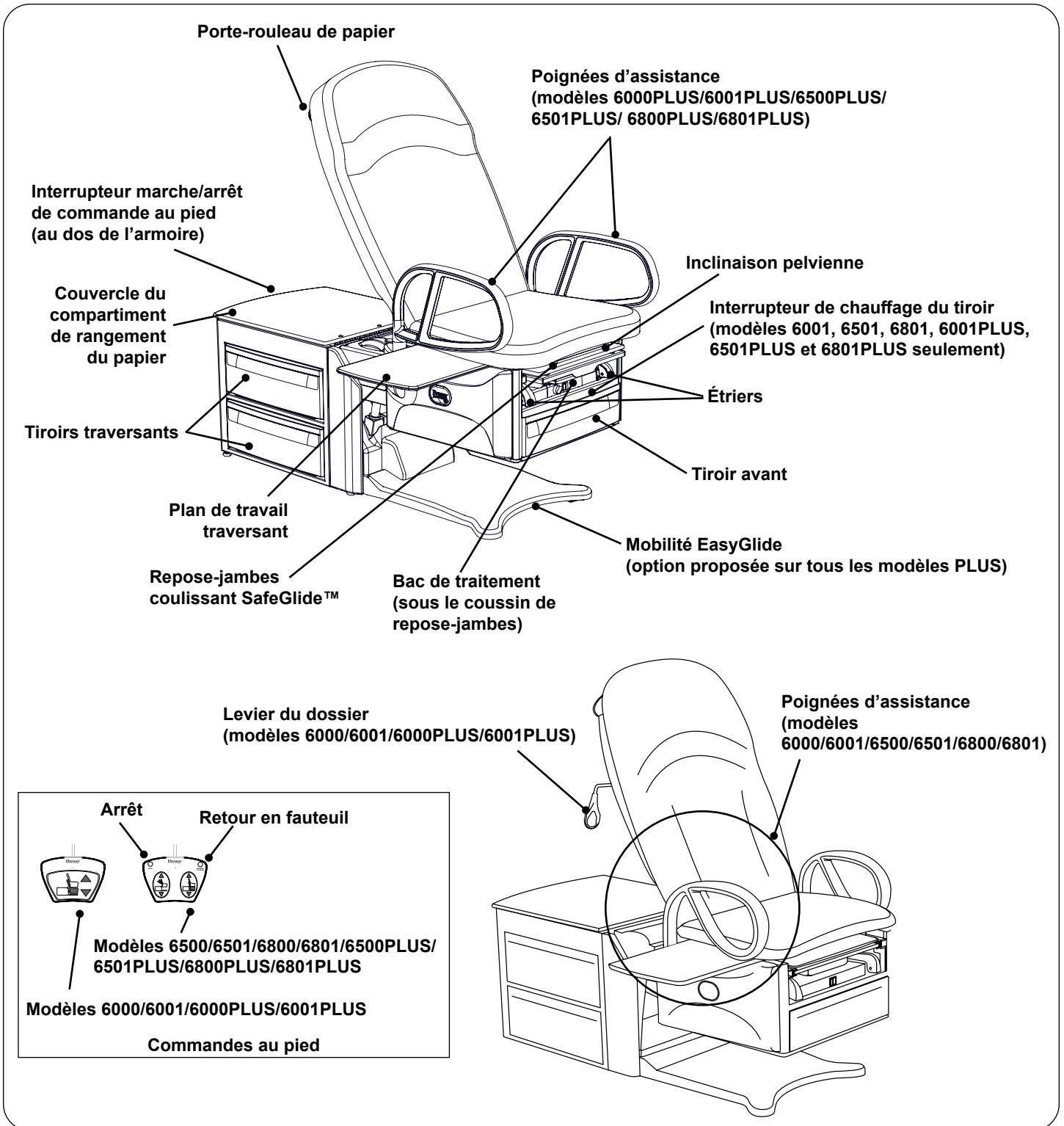

*Figure 2. Vue d'ensemble des composants*

## CARACTÉRISTIQUES

### Poids de la table

- Modèles 6000/6001/6500/6501..... 179 kg (395 lb)
- Modèle 6800 ..... 192 kg (423 lb)
- Modèle 6801 ..... 196 kg (432 lb)
- Modèles 6000PLUS/6001PLUS/  
6500PLUS/6501PLUS ..... 186 kg (410 lb)
- Modèle 6800PLUS ..... 199 kg (438 lb)
- Modèle 6801PLUS ..... 203 kg (447 lb)

### Capacité de charge (maximale)

- Assise/dossier 6800/6801/  
6800PLUS/6801PLUS ..... 318 kg (700 lb)
- Assise/dossier 6000/6001/  
6500/6501/6000PLUS/  
6001PLUS/6500PLUS/6501PLUS ..... 204 kg (450 lb)
- Repose-jambes ..... 23 kg (50 lb)
- Plan de travail traversant ..... 7 kg (15 lb)
- Poignées d'assistance ..... 45 kg (100 lb)

**Dossier** ..... 0° (horizontal) à 80° ± 5°

### Hauteur du dessus

**de table** ..... 46 ± 1,3 cm à 94 ± 2,5 cm  
(18 ± 0,5 po à 37 ± 1,0 po)

### Réglage de l'inclinaison pelvienne

- Modèles 6001/6501/6801/  
6001PLUS/6501PLUS/  
6801PLUS seulement ..... 0° (horizontal) à 6° (relevé)

### Dimensions des coussins

- Coussins de  
dessus de table ....(lxL) 71 cm x 152 cm (28 po x 60 po)
- Coussin de  
repose-jambes .....(Lxl) 46 cm x 46 cm (18 po x 18 po)
- Longueur totale ..... 152 cm (60 po)
- Avec repose-jambes déployé ..... 198 cm (78 po)

### Alimentation électriques

- **Modèles 6000/6500/6800/6000PLUS/6500PLUS/6800 PLUS** : 115 V c.a. nominal, 60 Hz, 6,0 A max.
- **Modèles 6001/6001PLUS** : 115 V c.a. nominal, 60 Hz, 6,0 A max.
- **Modèles 6001/6501/6801/6001PLUS/6501PLUS/6801PLUS avec prise** : 115 V c.a. nominal, 60 Hz, 6,0 A max.
- **Modèles 6000-230/6500-230/6800-230** : 230 V c.a. nominal, 50/60 Hz, 3,0 A max.
- Charge max. de la prise ..... 2,0 A

### Fusibles

- Fusibles de tiroir chauffant (en option)..... 250 V/1,0 A
- Fusible tiroir chauffant et prise (en option)... 250 V/2,0 A

### Cycle de service (10 %)

..... Marche 2 min/arrêt 18 min  
(temps de marche moteur)

### Cordon d'alimentation

- Longueur ..... Jusqu'à 178 cm (70 po)  
minimum à partir de la table
- Type (6000/6500/6800/6000PLUS/  
6500PLUS/6800PLUS) ..... Fixe
- Type (6001/6501/6801/6001PLUS/  
6501PLUS/6801PLUS, 6000-230,  
6500-230, 6800-230)..... Détachable
- Conducteurs ..... 18 AWG/3 conducteurs
- Classe ..... Fiche de qualité hôpital

### Type de protection contre les chocs électriques

- Modèles 6000/6500/  
6800/6000PLUS/  
6500PLUS/6800PLUS ..... Classe 2 à double isolation
- Modèles 6001/6501/  
6801/6001PLUS/6501PLUS/  
6801PLUS ..... Classe 1 à mise à la terre
- Modèles 6000-230/  
6500-230/6800-230 ..... Classe 2 à double isolation
- Parties appliquées en contact  
avec le patient (tous modèles) ..... Type B

### Type de protection contre

**la pénétration d'eau**.....Pédale de commande IPX1

### Dimensions des rouleaux de papier

- Standard..... 46 cm x 8,9 cm (18 po x 3,5 po)
- Long ..... 53 cm x 8,9 cm (21 po x 3,5 po)

**Certifications\*** .... UL60601-1; CAN-CSA C22.2 No. 601.1

### Conditions de fonctionnement

- Plage de température..... 5 °C à 40 °C (41 °F à 104 °F)
- Plage d'humidité..... 10 % à 80 %

### Transport et entreposage

- Plage de température... -10 °C à 50 °C (14 °F à 122 °F)
- Plage d'humidité..... 10 % à 80 %



\*Classifications aux États-Unis et au Canada selon les normes indiquées ci-dessus.

Les modèles 230 V n'ont pas été évalués

**CARACTÉRISTIQUES (SUITE)****AVERTISSEMENT : Risque d'explosion  
et d'incendie**

Ne pas utiliser cette table dans une atmosphère explosive ou riche en oxygène. Cela peut provoquer des blessures graves, voire mortelles.

**AVERTISSEMENT : Risque de choc électrique**

Lors d'une cautérisation ou autre traitement semblable, le patient doit être isolé des parties métalliques de la table par un matériau non conducteur afin d'écartier les risques de choc électrique.

**AVIS : CERTIFICATIONS**

Ce produit a été évalué en termes de risques mécaniques, de choc électrique et d'incendie conformément à UL60601-1; CAN/CSA C22.2 No. 601.1.

**AVIS : Brouillage électromagnétique (EMI)**

Ce produit est conçu et fabriqué de manière à minimiser le brouillage électromagnétique avec d'autres appareils; toutefois, si un brouillage est observé entre un autre appareil et ce produit, sortir l'appareil perturbateur de la pièce ou brancher ce produit sur un circuit isolé.

## INSTALLATION

### AVIS : Contrôler les emballages et leur contenu

Contrôler l'état de toutes les boîtes et de leur contenu. Signaler immédiatement tout dommage au transporteur.

### AVIS : Ne pas utiliser d'outils tranchants

Pour éviter d'endommager les coussins de la table ou les surfaces peintes, NE PAS utiliser de couteau ou autre objet tranchant pour ouvrir l'emballage.

### Vue d'ensemble

Effectuer les opérations suivantes dans l'ordre pour installer la table :

- Déballage de la table
- Mise à niveau de la table
- Branchement de la pédale de commande
- Branchement du cordon d'alimentation
- Pose des poignées d'assistance

### AVIS : Fonctionnement optimal de la table

Pour assurer un fonctionnement optimal de la table, la laisser atteindre la température ambiante avant de l'utiliser.

### Déballage

#### Outils nécessaires

- Visseuse
- Douille 7/16 po ou clé de 7/16 po
- Embout Phillips n° 2
- Pince coupante
- Chariot de déménagement

#### Fournitures nécessaires

- Aucune

#### Instructions

1. Détacher le carton des agrafes qui le fixent à la palette tout autour de la base de l'emballage. À l'aide d'un pince, retirer toutes les agrafes restées dans le carton.



Figure 3. Enlèvement du carton

2. La façon la plus facile d'enlever le carton est de le soulever par le côté qui porte l'inscription « Do Not Lift / Ne pas lever ».

**REMARQUE :** La table est protégée par un film étirable et de la micro-mousse.



#### ATTENTION

Ne pas brancher la table avant d'avoir enlevé tous les matériaux d'emballage.



#### ATTENTION


Les agrafes laissées dans le carton peuvent provoquer des dommages.



## INSTALLATION (SUITE)

- Retirer le film étirable qui enveloppe la table.
- Retirer les 4 à 6 attaches de transport en acier qui maintiennent la table à la palette (Figure 4). Ces attaches s'accrochent aux patins de nivellement de la table pour maintenir fermement la table sur la palette. Retirer les deux vis de chaque attache à l'aide d'une douille ou d'une clé de 7/16 po. Prendre garde à ne pas rayer l'appareil lors de l'utilisation de la visseuse ou de la clé. Une fois les vis retirées, dégager les attaches des patins de nivellement.

**REMARQUE :** Veiller à bien retirer toutes les attaches de transport afin d'éviter d'endommager le revêtement de sol de la pièce.

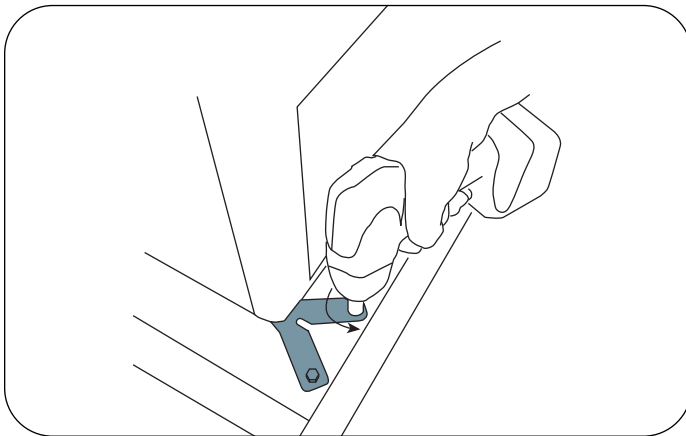

**Figure 4. Retirer les attaches de transport**

- Sur les tables HLT PLUS, retirer les deux vis et l'attache métallique qui maintiennent le châssis de la table sur la palette (Figure 5).


### AVIS

Veiller à bien suivre la procédure de déballage afin de ne pas endommager les éléments de l'option de mobilité ni causer d'autres dégâts matériels.




**Figure 5. Attache du modèle HLT PLUS**

- Retirer les 2 vis de fixation des cales d'espacement de part et d'autre de l'arceau de support en bois, sous les coins avant de l'armoire (Figure 6). Retirer les 2 vis de fixation de l'arceau de support sur la palette (Figure 6).

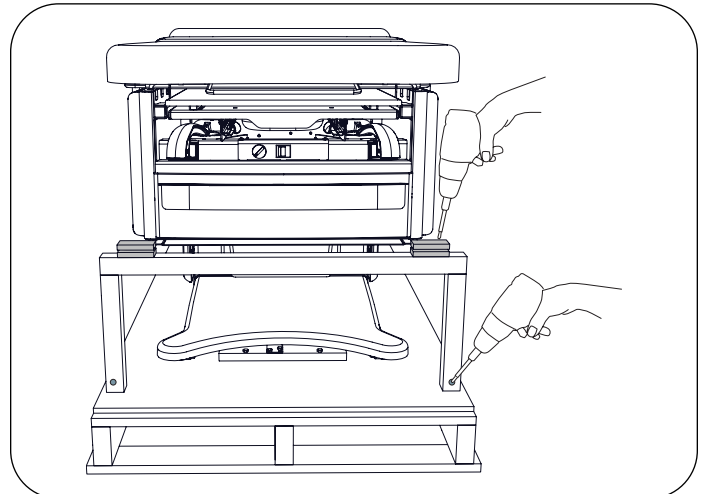

**Figure 6. Retirer les vis des cales et de l'arceau de support**

- Couper la sangle de transport et la mettre au rebut ainsi que le tube en mousse (Figure 7).

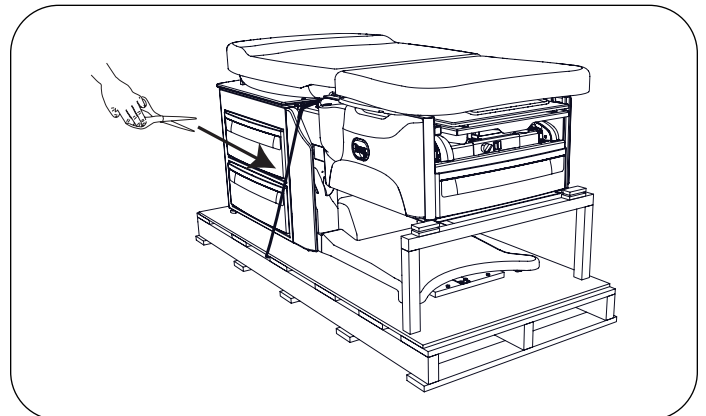

**Figure 7. Couper la sangle de transport**

## INSTALLATION (SUITE)

8. Veiller à bien retirer tous les matériaux d'expédition (à l'exception de l'arceau de support en bois et des cales d'espacement) et la mousse d'emballage de la table, de la palette et de la surface environnante.

**REMARQUE :** Pour descendre la table de la palette, elle doit préalablement être mise sous tension et son élévation par rapport à sa position d'expédition.

**AVIS : Éviter les dommages d'une activation intempestive**

Le branchement de la table dans une prise de courant avant d'avoir retiré tous les matériaux d'emballage peut entraîner des dommages en cas d'activation intempestive.

9. Sortir la pédale de commande du tiroir arrière.
10. Brancher le cordon de la pédale de commande dans la prise au bas du panneau arrière (Figure 8). Veiller à orienter les broches dans le bon sens et à enfoncer complètement la fiche. Tourner la bague de blocage dans le sens des aiguilles d'une montre pour attacher la fiche à la table.

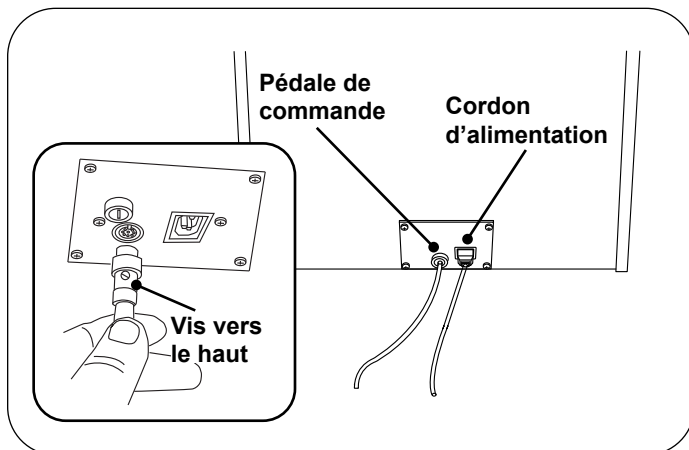




Figure 8. Branchement du cordon d'alimentation et de la pédale de commande

**REMARQUE :** Certains modèles n'ont pas de cordon d'alimentation détachable.

11. Sur les modèles 6001, 6501, 6801, 6501PLUS, 6801PLUS, 6000-230, 6500-230 et 6800-230, sortir le cordon d'alimentation du tiroir arrière. Sur les modèles 6000, 6500, 6800, 6000PLUS, 6500PLUS et 6800PLUS, le cordon d'alimentation est déjà installé.

	<b>ATTENTION</b>
Ne pas brancher de cordon de rallonge dans la prise accessoire.	

	<b>ATTENTION</b>
Brancher uniquement des appareils compatibles avec la table d'examen sur la prise accessoire.	

**AVIS : Vérifier la tension et le type de prise**

Voir les données électriques de cet appareil à la page Caractéristiques de ce manuel.



**ATTENTION : Utiliser une fiche avec mise à la terre**

Pour écarter tout risque de choc électrique, brancher cet appareil à un réseau électrique équipé d'une mise à la terre. Brancher la fiche avec broche de terre du cordon d'alimentation de la table dans une prise non isolée, correctement polarisée et reliée à la terre.

12. Brancher la fiche femelle du cordon d'alimentation dans la prise au bas du panneau arrière (Figure 8). Brancher la fiche mâle du cordon d'alimentation dans une prise de courant avec mise à la terre de 115 V ou 230 V en fonction de la configuration. S'assurer que l'interrupteur marche/arrêt noir de commande au pied à l'arrière de la table est en position de marche (Figure 9).

**AVERTISSEMENT : Risque d'obstacles environnants**

Avant tout mouvement, écarter les personnes et équipements de la table afin d'éviter tout risque de blessure et de dommages matériels.

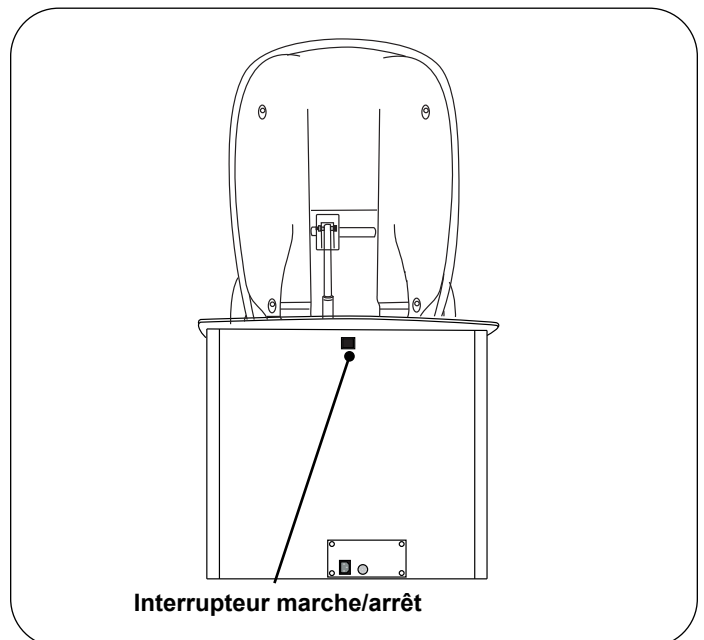


Figure 9. Interrupteur marche/arrêt de commande au pied

## INSTALLATION (SUITE)

13. Appuyer sur la commande « Lever » de la pédale pour élever l'assise d'environ 2,5 cm (1 po) (Figure 10).

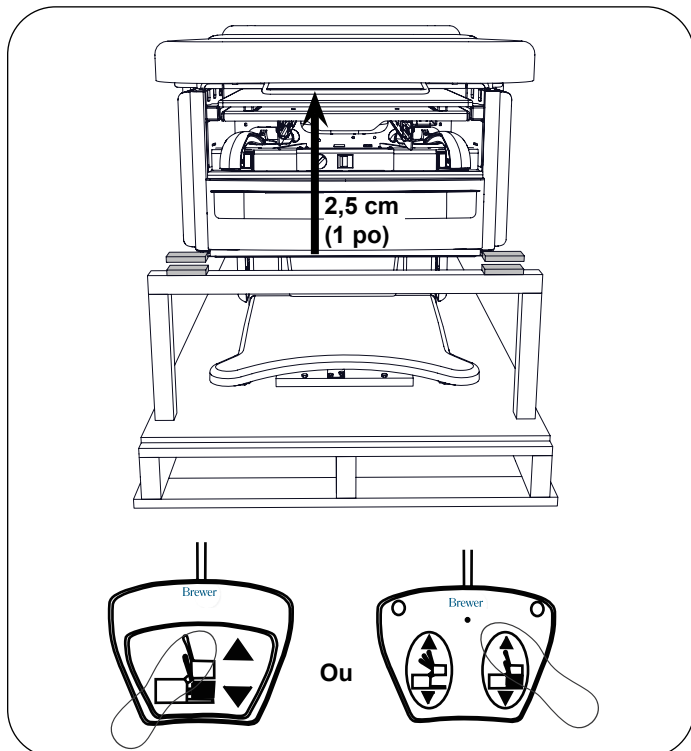


Figure 10. Élever l'assise pour dégager l'arceau de support

14. Retirer l'arceau de support en bois et les cales d'espacement de l'avant de la table.
15. Débrancher la pédale de commande et le cordon d'alimentation et les remettre dans le tiroir de rangement arrière (Figure 11). Le cordon d'alimentation des modèles 6000, 6500, 6800, 6000PLUS, 6500PLUS et 6800PLUS est fixé à la table. Il est conseillé de placer le côté fiche du cordon dans le tiroir de rangement arrière pour éviter de l'endommager lors du transport de la table.

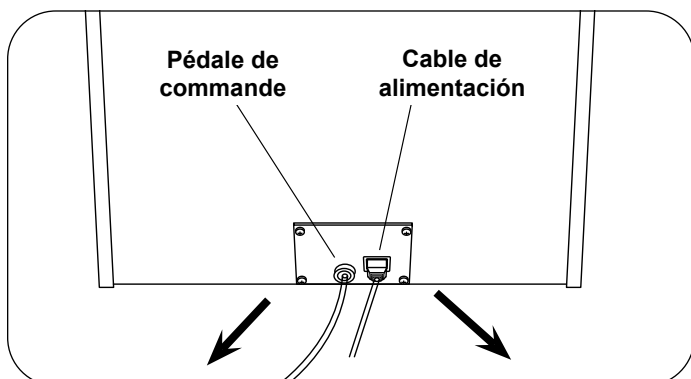


Figure 11. Branchement du cordon d'alimentation et de la pédale de commande

### AVIS : Éviter d'endommager le mécanisme d'inclinaison pelvienne et les coussins

Ne pas soulever ni déplacer la table en la tenant par le coussin de l'assise (Figure 12). Soulever par l'assise endommagerait le mécanisme d'inclinaison pelvienne (le cas échéant) et peut endommager le coussin.



Figure 12. NE PAS soulever par le coussin

### AVIS : Éviter d'endommager l'actionneur et le coussin du dossier

Ne jamais pousser le dossier vers l'avant pour déplacer la table. Pousser sur le dossier endommagerait l'actionneur du dossier et peut endommager le coussin (Figure 13).

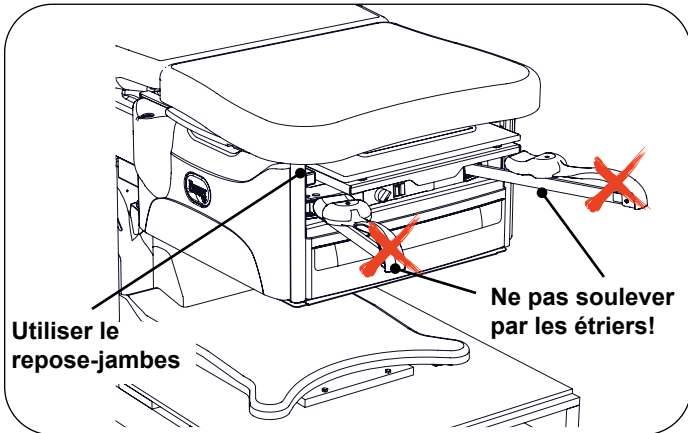


Figure 13. NE PAS pousser sur le dossier

**INSTALLATION (SUITE)**


**AVIS : Éviter d'endommager les étriers**

Ne pas soulever ni déplacer la table en la saisissant par les étriers. Soulever ou déplacer la table par les étriers peut endommager le logement de l'indexeur interne (Figure 14).




**Figure 14. NE PAS soulever par les étriers**

16. Pour préparer l'avant de la table au levage, sortir le repose-jambes d'environ 15 cm (6 po) (Figure 15). NE PAS sortir complètement le repose-jambes car cela peut endommager le mécanisme de glissière.

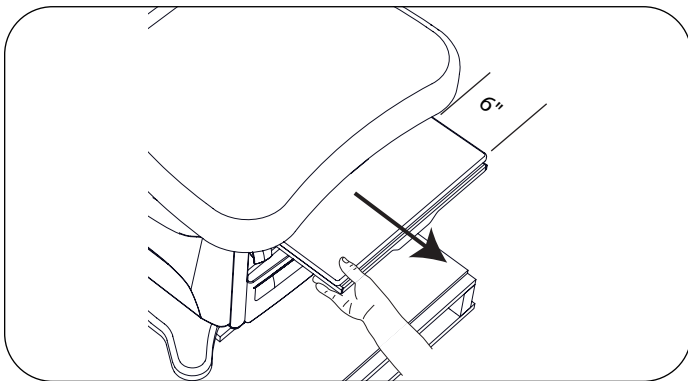


**Figure 15. Repose-jambes sorti de 15 cm (6 po)**

17. Pour préparer l'arrière de la table au levage, ouvrir le tiroir traversant arrière supérieur d'un côté de la table (Figure 16).

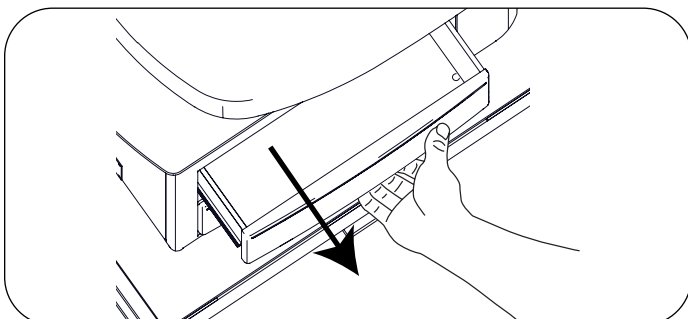


**Figure 16. Ouvrir le tiroir traversant arrière supérieur**

18. Placer le chariot de déménagement à côté et perpendiculairement à la palette pour le transfert de la table (Figure 17).

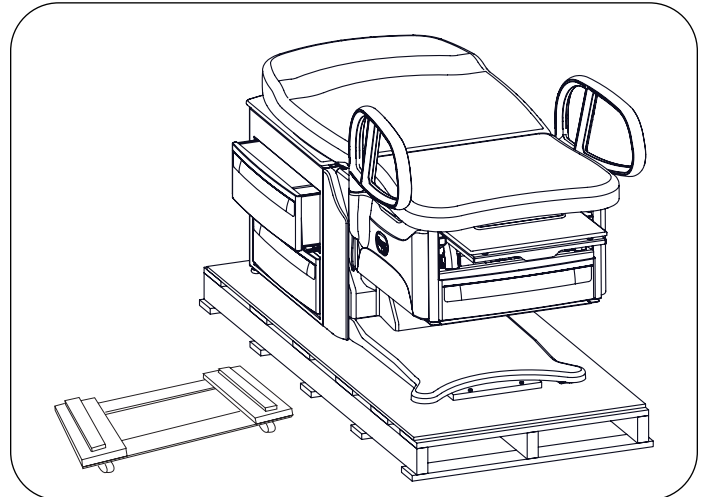

**Figure 17. Chariot de déménagement prêt pour la table**

19. Placer des personnes à l'avant et à l'arrière de la table. Les points de levage avant sont les côtés gauche et droit du repose-jambes (Figure 18).

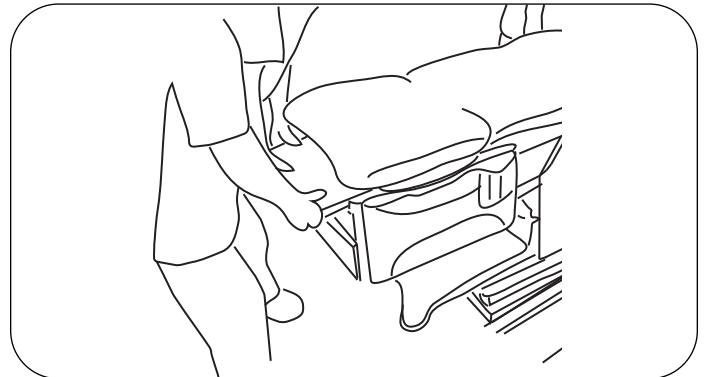

**Figure 18. Points de levage avant**

20. Les points de levage arrière sont les ouvertures du tiroir traversant arrière supérieur, sur les côtés gauche et droit (Figure 19, Figure 20, Figure 21).

## INSTALLATION (SUITE)

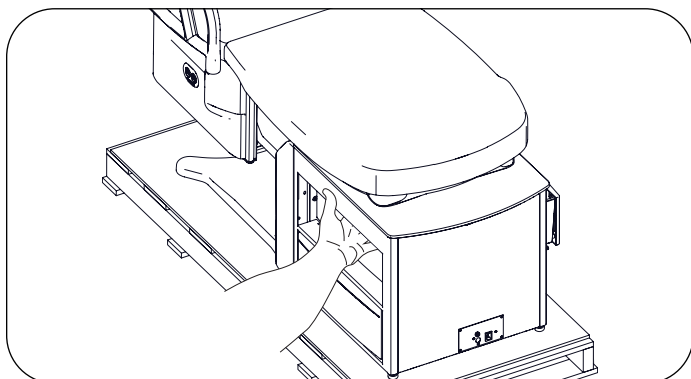


Figure 19. Prise de main arrière gauche

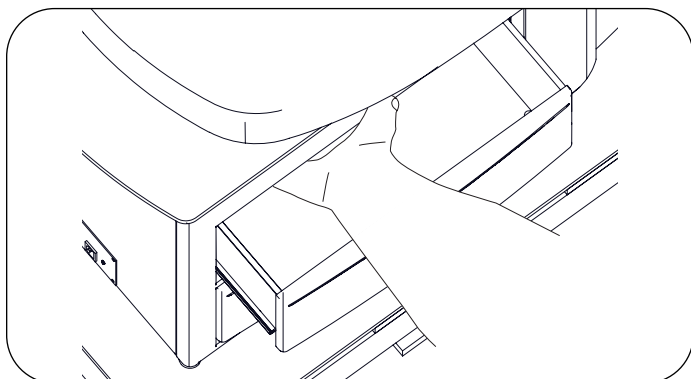


Figure 20. Prise de main arrière droite

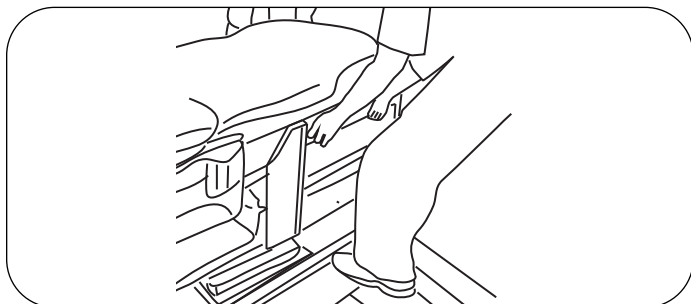


Figure 21. Points de levage arrière

## AVIS

La table pèse 203 kg (447 lb) environ.

### Transfert des tables d'examen Hi-Low (voir les instructions pour les modèles PLUS ci-dessous)

1. Pour des raisons de sécurité, transférer la table sur le chariot en deux étapes. Soulever la table verticalement, la déplacer à moitié hors de la palette et l'abaisser (Figure 22).

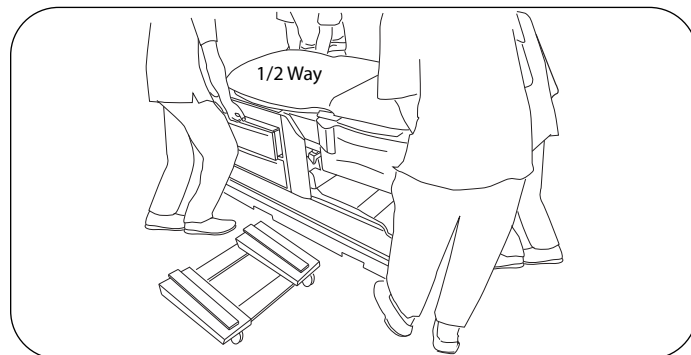


Figure 22. Points de levage arrière

2. Ajuster le placement des pieds et des mains. Soulever la table, l'amener au-dessus du chariot et l'abaisser.
3. Amener la table à son emplacement définitif. La soulever hors du chariot et la poser à sa place. Ne pas pousser ou tirer le repose-jambes vers les côtés pour positionner la table (Figure 23).



Figure 23. Ne pas sortir complètement le repose-jambes pour déplacer

## INSTALLATION (SUITE)

### Transfert des tables d'examen Hi-Low PLUS

1. Pour des raisons de sécurité, transférer la table sur le chariot en deux étapes. À quatre personnes, soulever la table et la tourner de 90° pour la dégager de la cale en bois sur la palette de transport. Abaisser la table.
2. Glisser le chariot de déménagement sous l'avant de la table. Ajuster le placement des pieds et des mains. Soulever la table, l'amener au-dessus du chariot et l'abaisser.

**REMARQUE :** Le centre de gravité de la table HLT PLUS se trouve vers l'avant de la table. Placer la table sur le chariot de telle façon qu'elle ne puisse pas basculer.

3. Amener la table à son emplacement définitif. La soulever hors du chariot et la poser à sa place. Lorsque le repose-jambes est complètement sorti, ne pas le pousser ou le tirer vers les côtés pour positionner la table (Figure 24).



**Figure 24. Ne pas sortir complètement le repose-jambes pour déplacer**

### Mise à niveau de la table

#### Outils nécessaires

- Aucune


#### Fournitures nécessaires

- Aucune

#### Instructions

Il y a des patins de nivellement à vis (Figure 25) à quatre ou six emplacement sous le socle et l'armoire arrière de la table. Ajuster les quatre ou six patins de nivellement de façon à obtenir un appui stable et de niveau. Cela peut être plus facile à réaliser pendant que la table est sur le chariot ou durant la transition de la palette au chariot.

Avant d'utiliser l'option de mobilité EasyGlide sur les modèles PLUS, s'assurer que les patins de nivellement arrière sont réglés de telle façon que les roulettes de déplacement s'abaissent au-delà des quatre patins arrière. Pour cela, activer l'option de mobilité et vérifier qu'il y a un espace libre sous les patins.

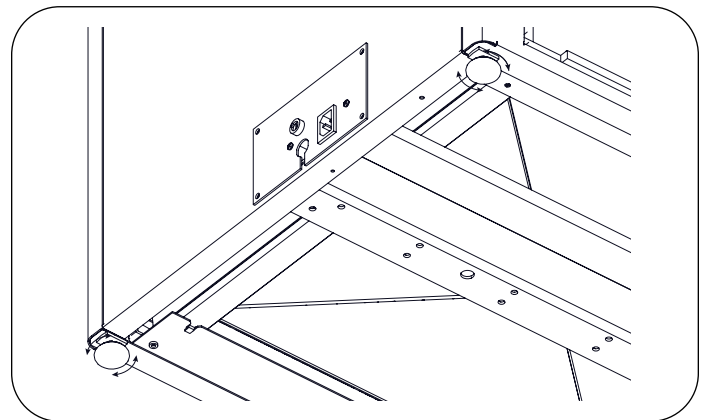

**Figure 25. Patin de nivellement à vis (sous la table)**

#### AVIS : Éviter d'endommager les patins de nivellement

Les patins de nivellement doivent rester dans la table et être complètement engagés d'un minimum de trois (3) tours. Si les patins de nivellement ne sont pas complètement engagés dans le socle, cela peut endommager les filetages du socle et des patins.

#### AVIS : Éviter les dommages au plancher et les déplacements indésirables de la table

Vérifier qu'il y a des capuchons sur tous les (4 à 6) patins de nivellement. L'absence de capuchons peut entraîner un déplacement non optimal de la table ou endommager le plancher.

## INSTALLATION (SUITE)

### Branchement du cordon d'alimentation (modèles 6001, 6501, 6801, 6001PLUS, 6501PLUS et 6801PLUS)

1. Sortir le cordon d'alimentation du tiroir arrière et retirer son emballage.
2. Brancher la fiche femelle du cordon d'alimentation dans la prise de la table (Figure 26). Veiller à enfoncer complètement la fiche.

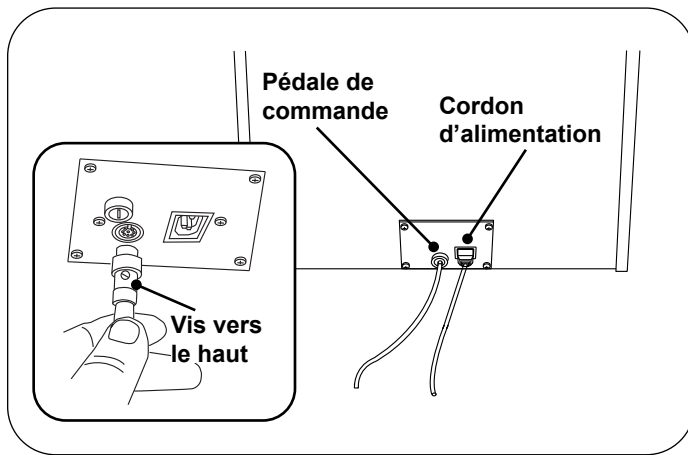


Figure 26. Branchement du cordon d'alimentation et de la pédale de commande

**REMARQUE :** Le cordon d'alimentation est installé en usine sur les modèles 6000, 6500, 6800, 6000PLUS, 6500PLUS et 6800PLUS.

#### AVIS : Vérifier la tension et le type de prise

Voir les données électriques de cet appareil à la page Caractéristiques de ce manuel. La fiche à trois broches avec mise à la terre du cordon d'alimentation de la table doit être branchée dans une prise de 115 V c.a. ou 230 V c.a. à trois broches non isolée, correctement polarisée et reliée à la terre.

### Branchement de la pédale de commande

1. Brancher la fiche mâle de la pédale de commande dans la prise de la table (Figure 26). Veiller à orienter les broches dans le bon sens et à enfoncer complètement la fiche.
2. Tourner la bague de blocage dans le sens des aiguilles d'une montre pour attacher la fiche à la table.

#### AVIS : Éviter les dommages à la pédale de commande

La pédale de commande résiste à l'humidité et fonctionne à basse tension, ce qui élimine les risques de choc électrique. Toutefois, pour éviter les dommages temporaire ou irréversibles à la pédale de commande, ne pas l'immerger dans l'eau ou autre liquide.

### Pose des poignées d'assistance

1. Sortir les poignées d'assistance du tiroir et retirer leur emballage.
2. Monter les poignées d'assistance d'un côté ou de l'autre, elles sont interchangeables.
3. Aligner l'ergot situé sur la colonne de la poignée sur l'encoche correspondante dans le côté de la table. Voir Figure 27.

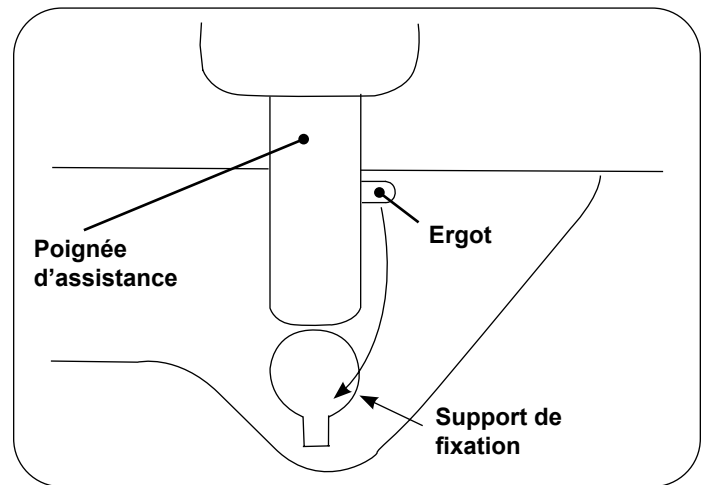


Figure 27. Poignée d'assistance

4. Enfoncer la poignée d'assistance jusqu'au fond et la tourner vers l'avant de la table.
5. Pousser la poignée d'assistance vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'engage de façon à bloquer les mouvements vers la gauche ou la droite.



#### AVERTISSEMENT : Risque de choc électrique

Après avoir installé ou déplacé la table, vérifier qu'il n'y a pas de fils endommagés ou exposés susceptibles de provoquer un choc électrique.

**REMARQUE :** Tous les cordons d'alimentation doivent être fournis par The Brewer Company.

**FONCTIONNEMENT**

**Avant l'utilisation**

	<p><b>ATTENTION : Lire ce manuel</b> Lire ce manuel avant d'utiliser la table d'examen Brewer Access High-Low ou High-Low PLUS.</p>
--	---

	<p><b>AVERTISSEMENT : Risque de choc électrique</b> Lors d'une cautérisation ou autre traitement semblable, le patient doit être isolé des parties métalliques de la table par un matériau non conducteur afin d'écartier les risques de choc électrique.</p>
--	---

	<p><b>AVERTISSEMENT : Risque d'explosion et d'incendie</b> Ne pas utiliser cette table dans une atmosphère explosive ou riche en oxygène. Cela peut provoquer des blessures graves, voire mortelles.</p>
--	--

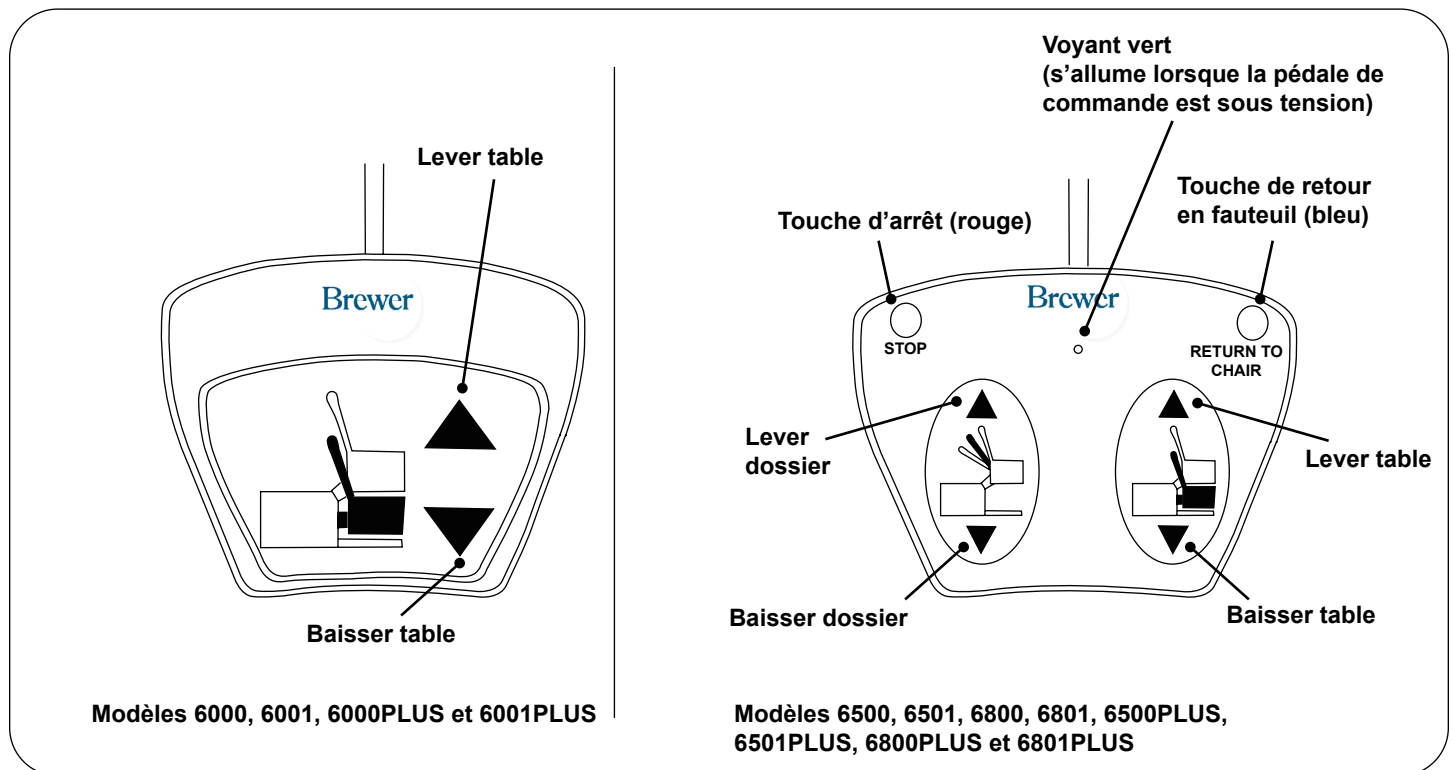


Figure 28. Commandes au pied



## FUNCTIONNEMENT (SUITE)

### Modèles 6000, 6001, 6000PLUS et 6001PLUS

Les modèles 6000, 6001, 6000PLUS et 6001PLUS sont équipés d'une pédale de commande simple qui permet d'élever et d'abaisser l'assise.

### Modèles 6500, 6501, 6800, 6801, 6500PLUS, 6501PLUS, 6800PLUS et 6801PLUS

Les modèles 6500, 6501, 6800, 6801, 6500PLUS, 6501PLUS, 6800PLUS et 6801PLUS sont équipés d'une pédale de commande double qui permet d'élever et d'abaisser l'assise, ainsi que de relever et de rabaisser le dossier. En outre, cette pédale comporte les commandes suivantes :

- **Return to Chair (retour en fauteuil) :** Lorsqu'on appuie sur cette touche, la table revient automatiquement à sa position de fauteuil bas. Le dossier se relève complètement et la table revient à sa position la plus basse. Pour interrompre le mouvement automatique, appuyer sur la touche rouge STOP ou sur toute autre touche de la pédale de commande.
- **Stop :** Appuyer dessus pour interrompre la fonction de retour en fauteuil.
- **Voyant vert :** Indique que la pédale de commande est sous tension (interrupteur marche/arrêt de commande au pied au dos de la table en position Marche).

#### AVIS : Fonctionnement imprévu

Pour éviter tout fonctionnement imprévu, tenir les objets étrangers à l'écart de la pédale de commande. S'assurer que la pédale de commande n'est pas placée sous l'avant de la table.

#### AVIS : Modèles 6500PLUS, 6501PLUS, 6800PLUS et 6801PLUS

Pour assurer un fonctionnement optimal, ne pas activer la fonction de retour en fauteuil en même temps qu'on engage ou qu'on désengage l'option de mobilité EasyGlide.

#### AVIS : Actionnement du retour en position fauteuil

Rester attentif au patient durant l'actionnement de la fonction de retour en position fauteuil. Il peut être nécessaire d'interrompre momentanément le mouvement le retour pour permettre au patient de réajuster sa posture ou enlever des obstacles avant de reprendre le mouvement. Appuyer sur la touche Return to Chair pour reprendre le mouvement uniquement lorsque le patient est prêt et que les obstacles ont été enlevés.

### Contacteurs de sécurité de l'assise et du dossier

#### Tous les modèles

Tous les modèles sont équipés de contacteurs de sécurité. Ils sont placés sous le capot du dossier, sur l'arrière de l'assise et sur le dessous du fauteuil. Chaque contacteur de sécurité interrompt automatiquement la fonction d'abaissement en présence d'une obstruction (Figure 29).

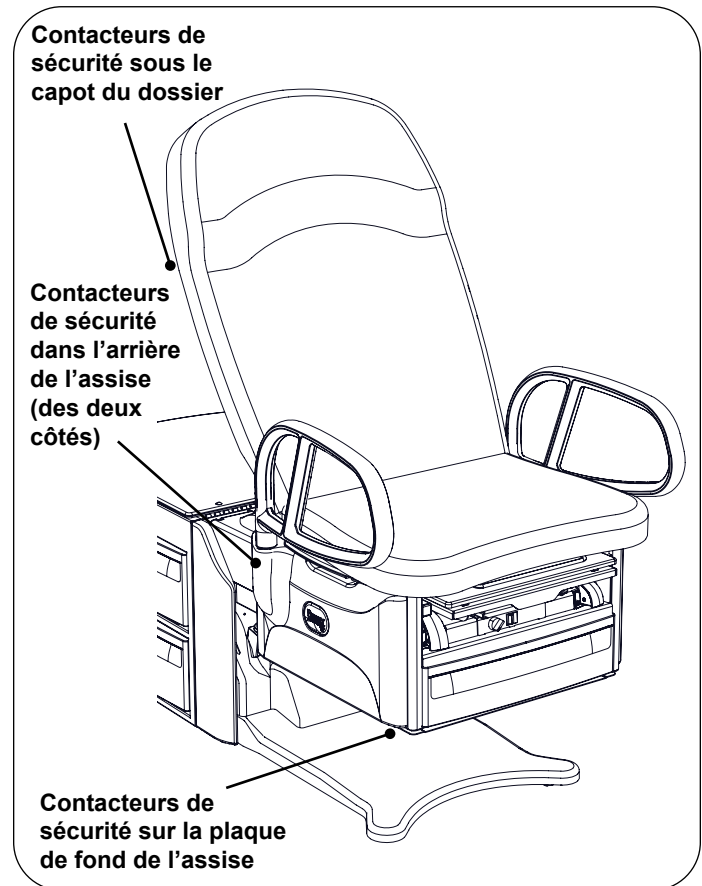


Figure 29. Contacteurs de sécurité de l'assise et du dossier

#### Contacteur d'assise

Tous les modèles sont équipés de contacteurs sous l'assise (Figure 29) qui interrompent automatiquement la fonction d'abaissement de la table si la plaque de fond de l'assise vient au contact d'un objet. Pour continuer à abaisser la table, appuyer sur la commande LEVER TABLE de la pédale (Figure 28), dégager l'obstruction et reprendre l'abaissement.

## FUNCTIONNEMENT (SUITE)

### Dossier électrique à contacteur de sécurité

Les modèles 6500, 6501, 6800, 6801, 6500PLUS, 6501PLUS, 6800PLUS et 6801PLUS sont équipés de contacteurs de sécurité placés sous le capot du dossier qui interrompent automatiquement la fonction d'abaissement de l'assise et du dossier en présence d'une obstruction. Pour continuer à abaisser le dossier, appuyer sur la commande LEVER TABLE ou LEVER DOSSIER de la pédale (Figure 28), dégager l'obstruction et reprendre l'abaissement.

### Dossier manuel

Les modèles 6000, 6001, 6000PLUS et 6001PLUS à dossier manuel sont équipés de contacteurs de sécurité placés sous le capot du dossier qui interrompent automatiquement la fonction d'abaissement de l'assise en présence d'un obstacle. Pour continuer à abaisser la table, actionner la poignée de déblocage du dossier pour relever le dossier (Figure 2), dégager l'obstruction et reprendre l'abaissement.

### Interrupteur marche/arrêt de commande au pied

#### Tous les modèles

L'interrupteur marche/arrêt de commande au pied (placé au dos de l'armoire arrière [Figure 30]) peut être mis en position Arrêt pour désactiver les mouvements de l'assise et du dossier de la table. L'alimentation électrique du tiroir chauffant (le cas échéant) et d'autres parties de la table reste activée.

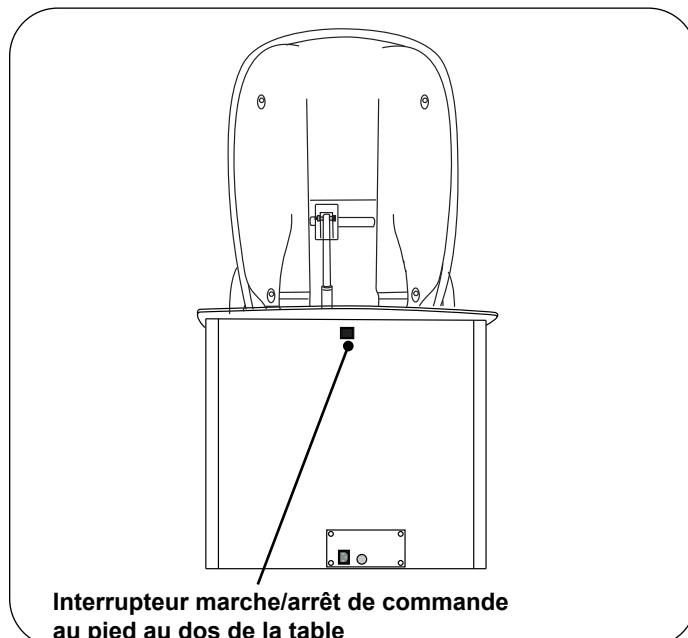


Figure 30. Interrupteur marche/arrêt de commande au pied

### Repose-jambes SafeGlide™

Le repose-jambes est placé sous le coussin de l'assise (Figure 31). Il peut être tiré jusqu'à une longueur de 46 cm (18 po) pour placer le patient en décubitus ventral. Tirer le repose-jambes jusqu'en position maximale. Pour remettre le repose-jambes dans sa position de rangement, il suffit de le repousser sous le siège.

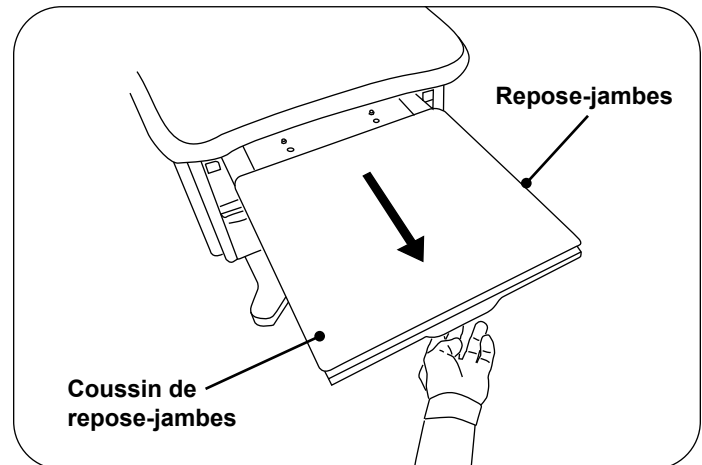


Figure 31. Sortir le repose-jambes



#### AVERTISSEMENT : Risque de chute

Ne pas laisser le patient s'asseoir sur la partie repose-jambes de la table. Cela peut provoquer des blessures graves, voire mortelles.

### Coussin de repose-jambes

Le coussin du repose-jambes peut être repoussé sous l'assise alors que le repose-jambes est sorti afin d'accéder au bac de traitement (Figure 32). Lorsqu'on repousse le repose-jambes sous le siège, les coulisses du coussin reviennent se loger dans les rainures. Ainsi, le coussin sortira à nouveau avec le repose-jambes lorsqu'il sera tiré vers l'extérieur.

## FONCTIONNEMENT (SUITE)

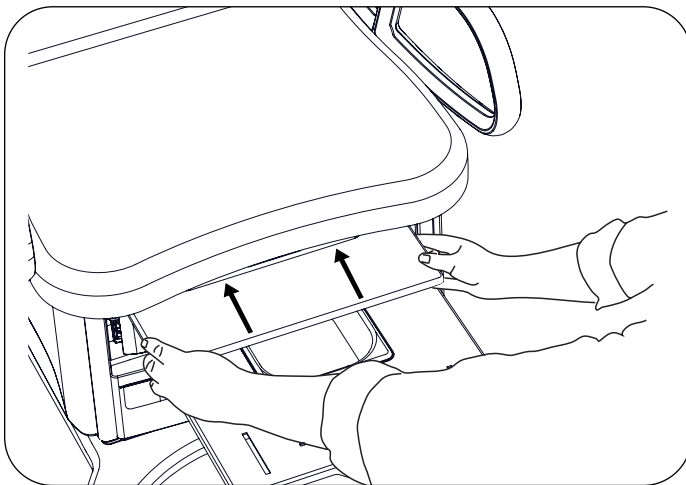


Figure 32. Rentrer le coussin du repose-jambes

### Bac de traitement

Un bac de traitement amovible, à utiliser durant les examens, est intégré sous le coussin du repose-jambes. Tirer complètement le repose-jambes et retirer le coussin ou le repousser sous l'assise pour accéder au bac (Figure 33). Retirer le bac de traitement pour le nettoyer.

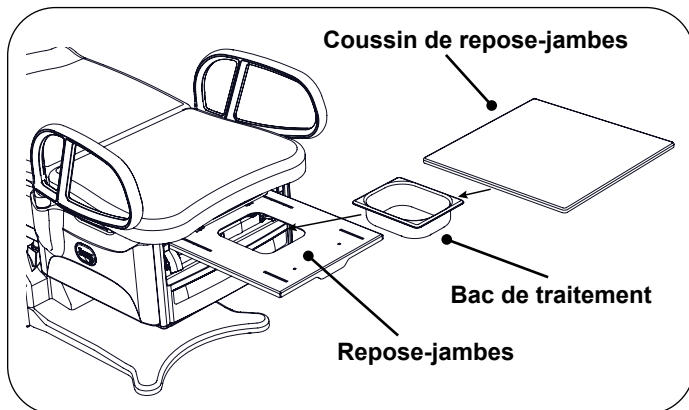


Figure 33. Bac de traitement

### Tiroir avant

Il y a un tiroir de rangement pour les fournitures sur l'avant de la table. Les modèles 6001, 6501, 6801, 6001PLUS, 6501PLUS et 6801PLUS sont équipés d'un tiroir chauffant commandé par un interrupteur placé au-dessus du tiroir (Figure 34).

*REMARQUE : L'élément chauffant se trouve au-dessus du tiroir et chauffe le contenu du tiroir par rayonnement. Les articles les plus proches de l'élément seront plus chauds que ceux placés au fond du tiroir. Éviter d'empiler les instruments ou de les laisser basculer et toucher l'élément.*

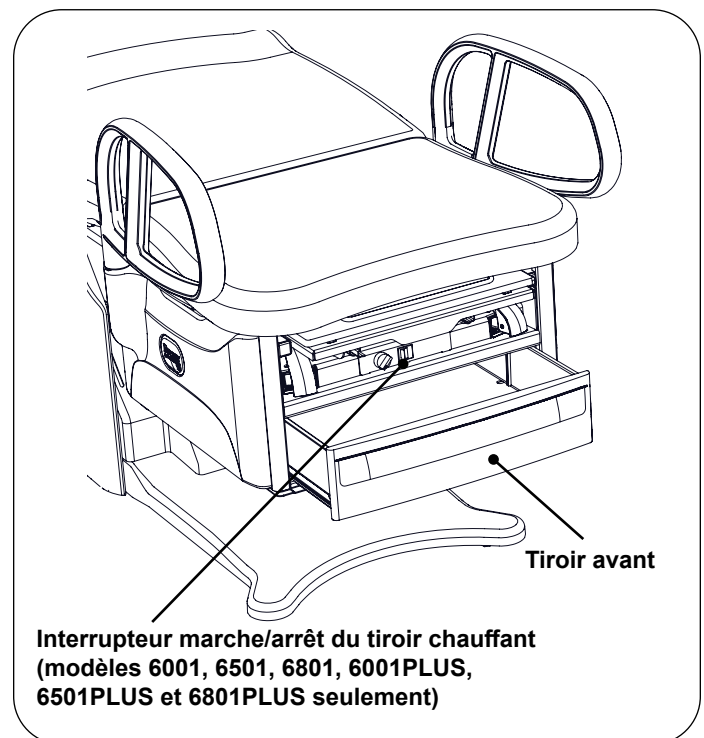


Figure 34. Interrupteur de chauffage et tiroir avant

## FUNCTIONNEMENT (SUITE)

### Porte-rouleau de papier

Pour changer un rouleau de papier, placer le rouleau neuf dans le porte-rouleau à l'arrière du dossier (Figure 35). Tirer le bout du rouleau de papier par-dessus le haut du dossier et le placer dans la position souhaitée.

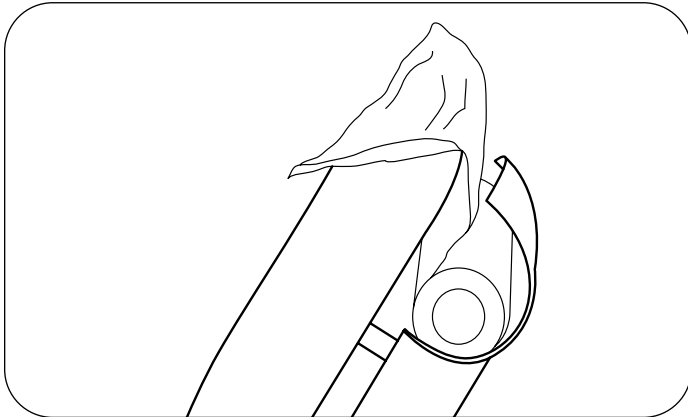


Figure 35. Pose du rouleau de papier

### Rangement du papier

Mettre le dossier en position verticale et soulever le couvercle sur l'arrière de la table pour accéder au compartiment de rangement du papier (Figure 36).

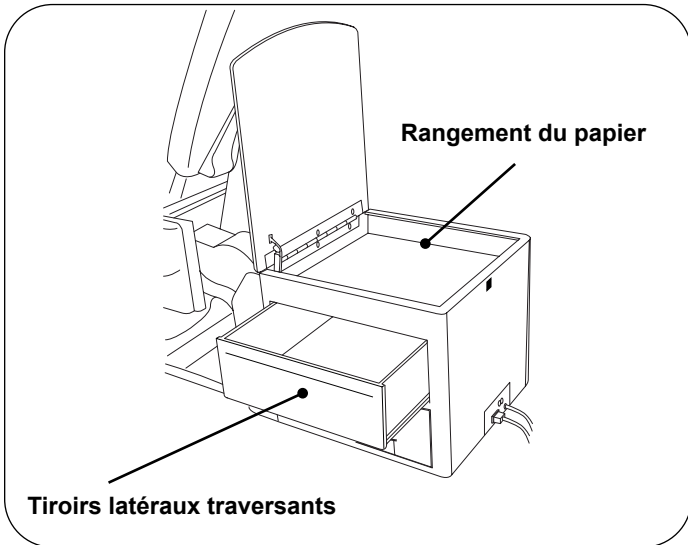


Figure 36. Rangement du papier et tiroirs latéraux traversants

### Tiroirs latéraux traversants

L'armoire de la table comporte deux tiroirs de rangement pour les fournitures (Figure 36). Ces tiroirs peuvent être tirés d'un côté ou de l'autre de la table.

### Montage des butées de tiroir

Les tables d'examen Brewer Access High-Low offrent la possibilité de ne permettre l'ouverture des tiroirs traversants que d'un des côtés. Cela nécessite de monter une butée sur chaque tiroir. Les butées de tiroir se trouvent dans un sachet de pièces détachées placé dans un tiroir arrière. La pose de ces butées empêche l'ouverture du tiroir de ce côté. C'est à l'utilisateur de choisir de quel côté, s'il y a lieu, il souhaite poser ces butées.

Pour monter les butées de tiroir :

1. Ouvrir les tiroirs du côté où on souhaite les utiliser.
2. Visser les butées de tiroir du côté opposé de l'armoire (Figure 37). On notera qu'une seule butée est nécessaire par tiroir.
3. Fermer les tiroirs traversant depuis le côté d'utilisation souhaité.

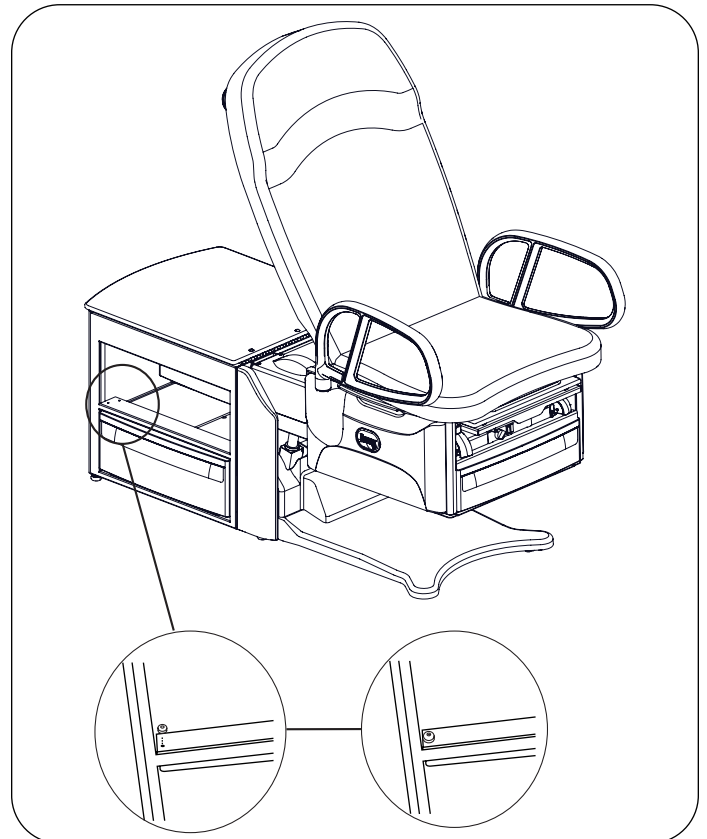


Figure 37. Butées de tiroir

## FUNCTIONNEMENT (SUITE)

### Plan de travail traversant

Un plan de travail traversant, rangé sous l'assise (Figure 38), peut être tiré d'un côté ou de l'autre de la table. Saisir le bord du plan de travail et tirer jusqu'à ce qu'il soit complètement sorti. Le repousser complètement pour le ranger après utilisation.



#### AVERTISSEMENT : Risque de chute

Le plan de travail a une capacité de charge de 7 kg (15 lb) et n'est pas destiné à être utilisé comme siège. Le fait de s'asseoir sur le plan de travail peut le plier ou le casser ou faire basculer la table et provoquer une chute entraînant des blessures ou la mort.

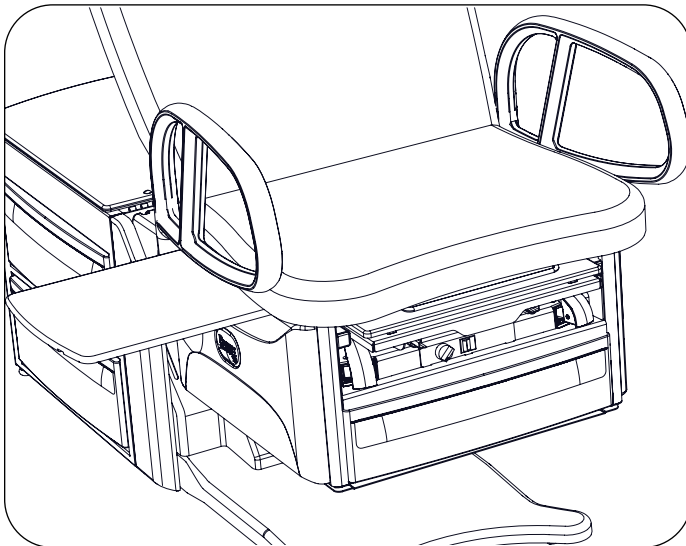


Figure 38. Plan de travail traversant

### Démontage du plan de travail pour le nettoyage

1. Repousser le plan de travail vers l'intérieur pour accéder à une vis en plastique blanc.
2. Retirer la vis (Figure 39).
3. Tirer le plan de travail vers soi et l'extraire complètement.
4. Remonter la vis après avoir remis le plan de travail en place.

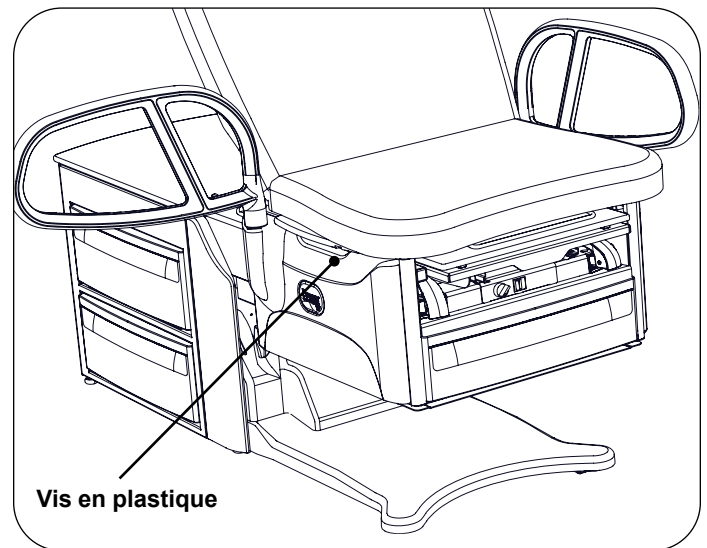


Figure 39. Emplacement de la vis de butée en plastique blanc

## FUNCTIONNEMENT (SUITE)

### Poignées d'assistance

En position avant (utilisation normale), les poignées d'assistance sont bloquées de façon à empêcher toute rotation vers la gauche ou la droite.

Les poignées d'assistance peuvent être tournées vers le côté ou l'arrière de la table pour améliorer l'accès et la stabilité du patient. Tirer la poignée d'assistance vers le haut et la tourner jusqu'à la position souhaitée. La poignée d'assistance peut être bloquée en position avant, de côté et arrière (Figure 40).

Pour retirer la poignée d'assistance de la table, il suffit de la tirer vers le haut, la pivoter jusqu'en position 90°, puis la soulever pour l'extraire de son logement.

#### AVIS : Versions de poignées d'assistance

Certaines poignées d'assistance n'ont que deux (2) positions de blocage : avant et de côté.

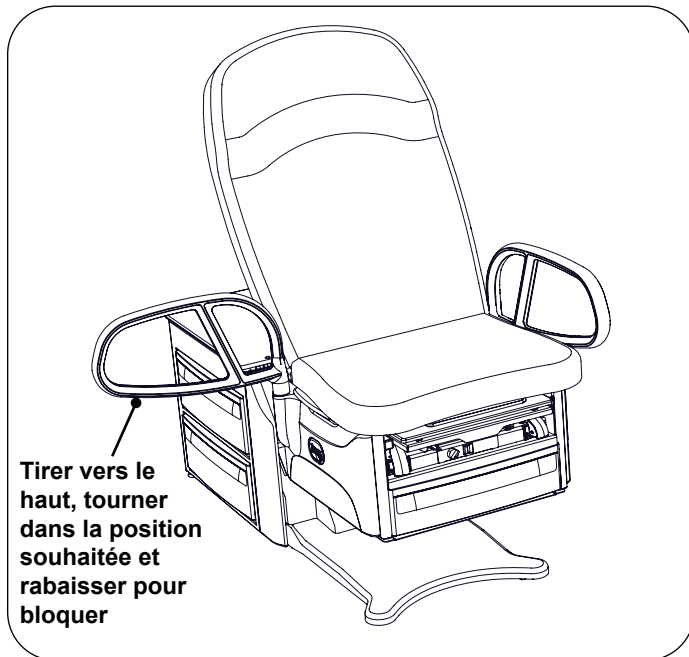


Figure 40. Réglage des poignées d'assistance

### Étriers réglables

#### Utilisation des étriers

1. Pour utiliser les étriers, saisir leur extrémité et les tirer tout droit hors de la table (Figure 42). Soulever légèrement l'étrier tout en le glissant vers soi.

*REMARQUE : Une pression vers le bas lorsqu'on tire l'étrier hors de la table peut rendre son mouvement difficile. La résistance est normale et fait partie du mécanisme de blocage par friction de l'étrier.*

2. Déployer complètement l'étrier vers le haut.
3. Glisser l'étrier vers l'intérieur ou l'extérieur de la table jusqu'à la longueur souhaitée.

#### Réglage latéral des étriers

1. Soulever légèrement le bout de l'étrier, puis le pivoter vers l'extérieur jusqu'à la position souhaitée.
2. Une fois dans la position souhaitée, rabaisser l'étrier pour engager le mécanisme de blocage latéral (Figure 41 et Figure 42).
3. Pour vérifier que le mécanisme de blocage latéral est engagé, essayer de déplacer l'étrier d'un côté à l'autre sans soulever son extrémité.

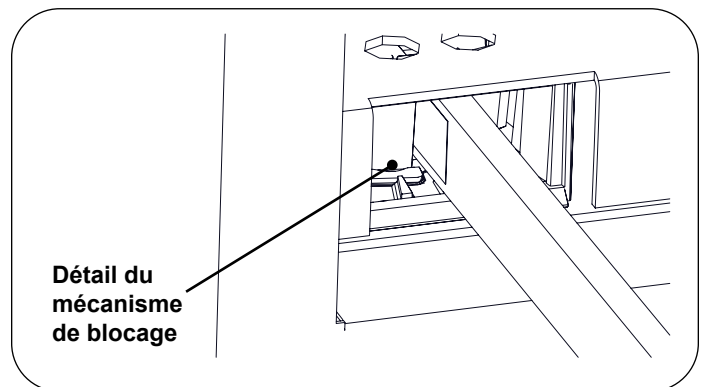


Figure 41. Mécanisme de blocage de l'étrier

## FUNCTIONNEMENT (SUITE)

### Rangement des étriers

1. Pour ranger les étriers dans la table, saisir l'extrémité de l'étrier et le tirer au maximum vers l'extérieur.
2. Rabattre l'étrier contre la barre, puis le faire pivoter latéralement au maximum vers l'intérieur et le glisser jusqu'en position de rangement.


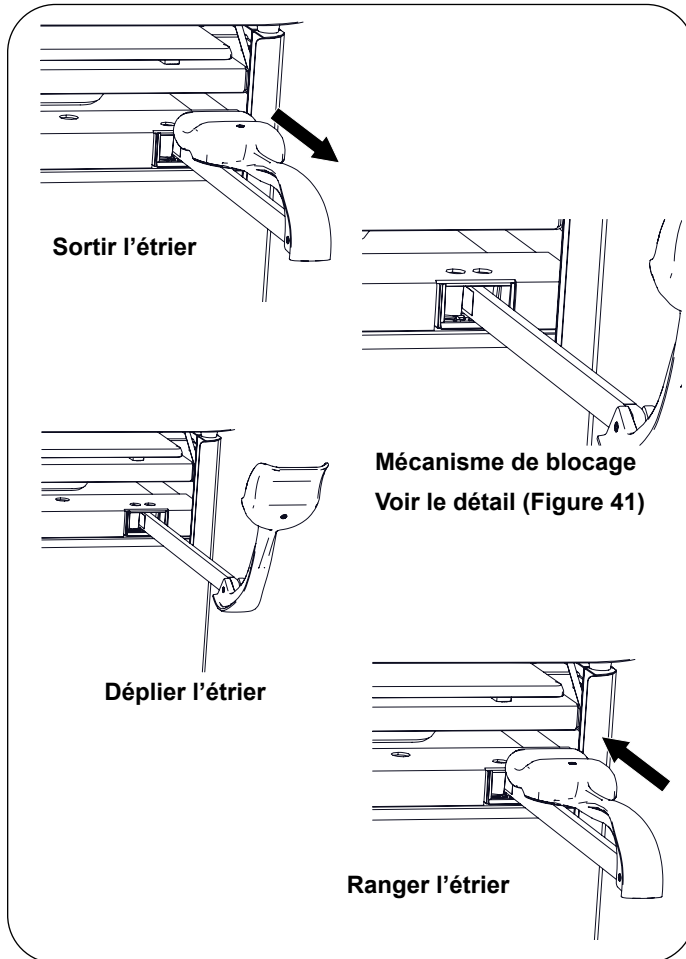


Figure 42. Étriers

### AVIS : Utiliser l'étrier uniquement comme prévu


N'attacher aucun autre dispositif à une quelconque partie de l'étrier. Cela invaliderait la garantie.

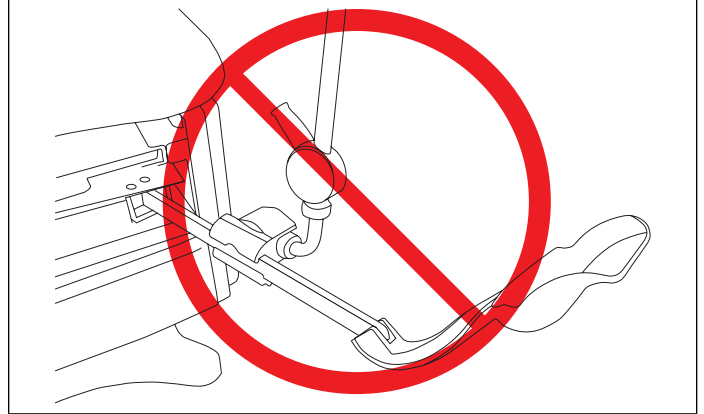

**FUNCTIONNEMENT (SUITE)**

**Hauteur de la table**

La table peut être réglée à n'importe quelle hauteur 46 cm à 94 cm (18 po à 37 po) (Figure 43).

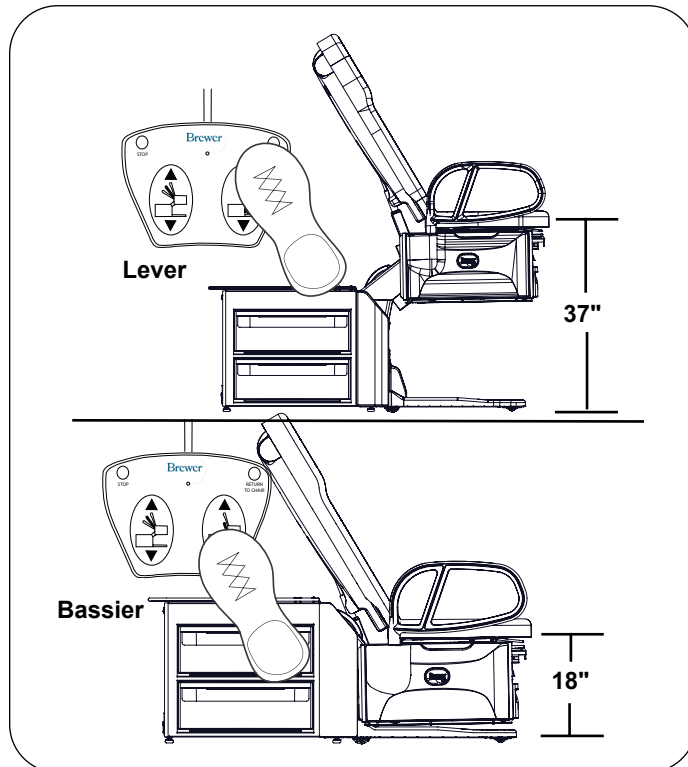

**Figure 43. Réglage de hauteur de la table**


1. Pour élever la table, tenir la commande Lever Table de la pédale enfoncée jusqu'à atteindre la hauteur souhaitée, puis relâcher la commande.
2. Pour abaisser la table, relever le dossier en position verticale, tenir la commande Baisser Table de la pédale enfoncée jusqu'à atteindre la hauteur souhaitée, puis relâcher la commande.
3. Appuyer sur la touche bleu pour activer la fonction de retour en position fauteuil (Figure 44).



**AVERTISSEMENT : Risque de pincement**

Lors des réglages de position, veiller à bien tenir les mains à l'écart de l'espace entre le coussin de dessus de table et l'armoire de la table.

**Touche de retour en fauteuil**  
Modèles 6500, 6501, 6800, 6801, 6500PLUS, 6501PLUS, 6800PLUS et 6801PLUS

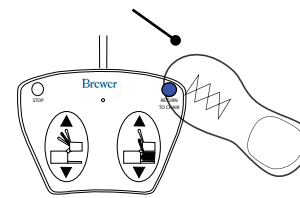

**Figure 44. Abaissement par retour en position fauteuil**

**AVIS : Protection des actionneurs en fin de course**

Chaque fonction de commande s'arrête automatiquement lorsqu'elle atteint sa limite de déplacement vers le haut ou le bas. Si la pédale de commande est actionnée en fin de course, l'actionneur ne s'active pas. Des capteurs empêchent le moteur de l'actionneur de fonctionner lorsque sa fin de course est atteinte afin d'éviter l'usure de l'actionneur.

**AVIS : Protection par coupe-circuit**

Le système de commande est protégé par un coupe-circuit contre les surintensités susceptibles d'endommager le système. Si le fonctionnement normal ne reprend pas au bout d'un délai de refroidissement d'une heure, appeler le 888-Brewer-1 (888-273-9371).



## FONCTIONNEMENT (SUITE)

### Dossier

L'inclinaison du dossier est réglable dans toute position entre l'horizontale et 80°.

#### AVIS : Pour abaisser complètement le dossier

La table doit être élevée à une hauteur de 71 cm (28 po) avant de pouvoir abaisser le dossier jusqu'en position horizontale (Figure 45).

### Dossier manuel pneumatique (modèles 6000, 6001, 6000PLUS et 6001PLUS)

1. Pour abaisser le dossier, appuyer dessus tout en tirant la poignée de déblocage vers le haut.



#### ATTENTION

##### Risque d'abaissement du dossier

L'actionnement de la poignée de déblocage manuel du dossier alors qu'un patient est assis sur la table peut entraîner un abaissement rapide du dossier. Abaisser le dossier par petits intervalles en actionnant et relâchant successivement la poignée. L'abaissement du dossier d'un seul coup peut blesser le patient.

2. Pour relever le dossier, placer la main dessus pour l'empêcher de se relever d'un coup, puis tirer la poignée de déblocage vers le haut. Le dossier se bloque dans la position souhaitée lorsqu'on relâche la poignée.

*REMARQUE : Le vérin pneumatique du dossier n'exerce pas une force suffisante pour relever le dossier lorsqu'un patient est allongé sur la table.*

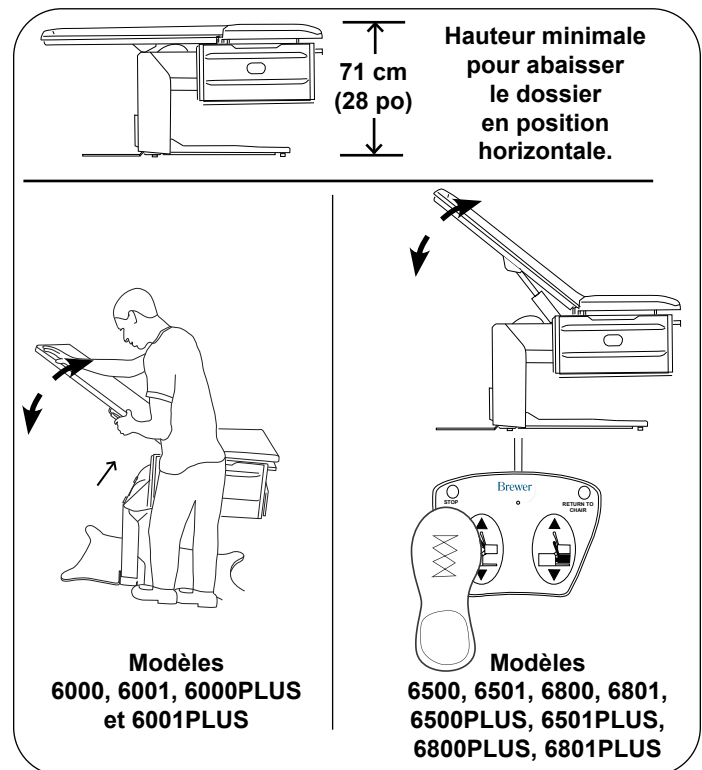


Figure 45. Réglage du dossier - le modèle réel peut être différent

### Dossier électrique (modèles 6500, 6501, 6800, 6801, 6500PLUS, 6501PLUS, 6800PLUS et 6801PLUS)

1. Pour abaisser le dossier, tenir la commande Baisser Dossier de la pédale enfoncée jusqu'à atteindre l'inclinaison souhaitée, puis relâcher la commande.
2. Pour relever le dossier, tenir la commande Lever Dossier de la pédale enfoncée jusqu'à atteindre l'inclinaison souhaitée, puis relâcher la commande.

#### AVIS : Actionneur de dossier électrique unidirectionnel

Sur les modèles à dossier électrique, la position du dossier est obtenue au moyen d'un actionneur unidirectionnel qui pousse le dossier pour le redresser. Pour l'abaisser, l'actionneur se rétracte et le dossier s'abaisse par gravité.

#### AVIS : Éviter l'actionnement en continu


Le système de commande de la table comprend un contacteur de sécurité thermique pour protéger contre la surchauffe. Si la table fonctionne en continu jusqu'à ce que la commande dépasse la température d'exploitation admissible, le contacteur de sécurité thermique coupe le circuit. Si le fonctionnement normal cesse, ne pas tenter de faire fonctionner la table. Laisser la table refroidir pendant 10 à 15 minutes avant de la réutiliser. Le contacteur de sécurité thermique se réarme automatiquement une fois qu'il atteint une température d'exploitation sécuritaire.

**FONCTIONNEMENT (SUITE)**

**Inclinaison pelvienne manuelle  
(modèles 6001, 6501, 6801, 6001PLUS,  
6501PLUS et 6801PLUS)**

La fonction d'inclinaison pelvienne manuelle permet de régler l'angle de l'assise à 0° (position horizontale) ou 6° (position haute).

Tirer l'avant de l'assise vers le haut et le mécanisme d'inclinaison pelvienne s'élève automatiquement jusqu'en position inclinée bloquée (Figure 46).

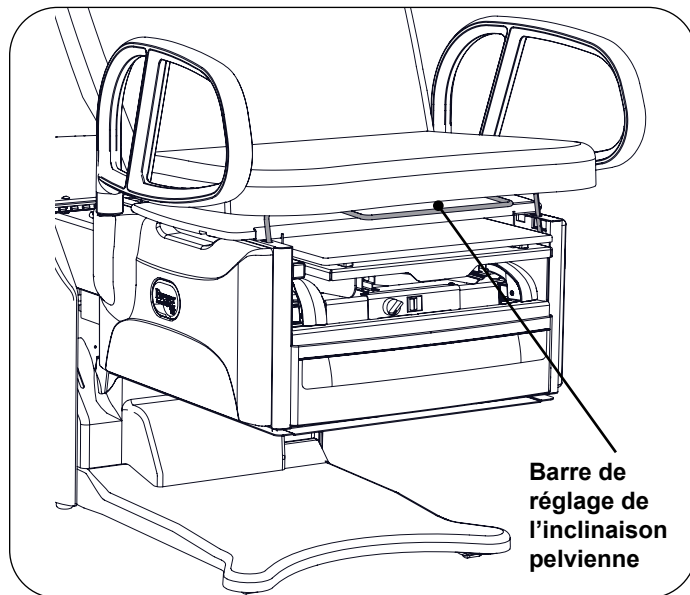

**Figure 46. Réglage de l'inclinaison pelvienne**

**AVIS : Actionnement du mécanisme d'inclinaison pelvienne**

Le fait de tirer avec une force excessive peut endommager le mécanisme d'inclinaison pelvienne. Soulever juste assez pour actionner le mécanisme.


Pour abaisser l'assise, lever le levier de réglage et abaisser l'assise jusqu'en position horizontale.

**AVIS : Abaissement du mécanisme d'inclinaison pelvienne**

Il ne doit pas y avoir de patient sur la table pour abaisser le mécanisme d'inclinaison pelvienne.

**Tiroir avant chauffant  
(modèles 6001, 6501, 6801, 6001PLUS,  
6501PLUS et 6801PLUS)**

Les modèles 6001, 6501, 6001PLUS et 6801PLUS sont équipés d'un tiroir chauffant commandé par un interrupteur placé au-dessus du tiroir (Figure 47).

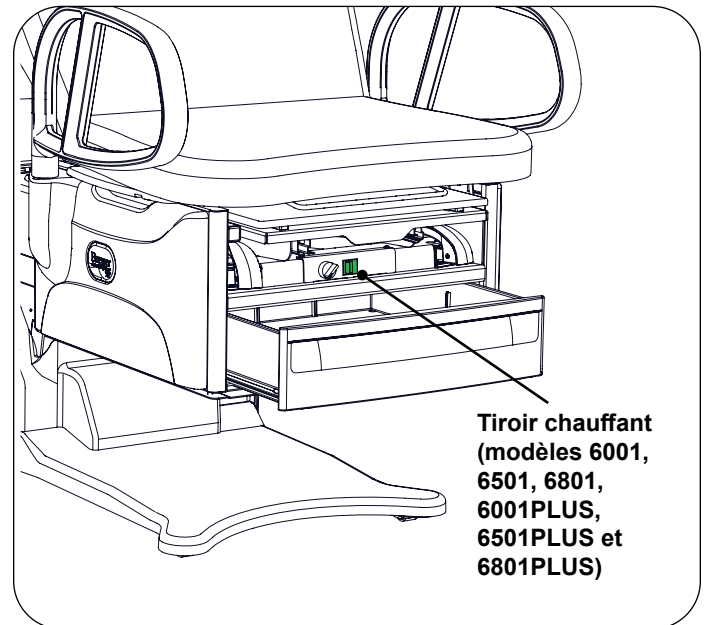

**Figure 47. Interrupteur de chauffage du tiroir avant**


**AVIS : Chargement correct du tiroir avant**

Ne pas empiler les instruments dans le tiroir avant. Placer les instruments en une seule couche dans le fond du tiroir.

## FONCTIONNEMENT (SUITE)

### Prise électrique (modèles 6001 (en option, 6501, 6801, 6501PLUS et 6801PLUS)

Les modèles 6001, 6501, 6801 6501PLUS et 6801PLUS sont équipés d'une prise électrique (Figure 48). La charge totale maximale pouvant être branchée sur la prise est de 2 ampère.

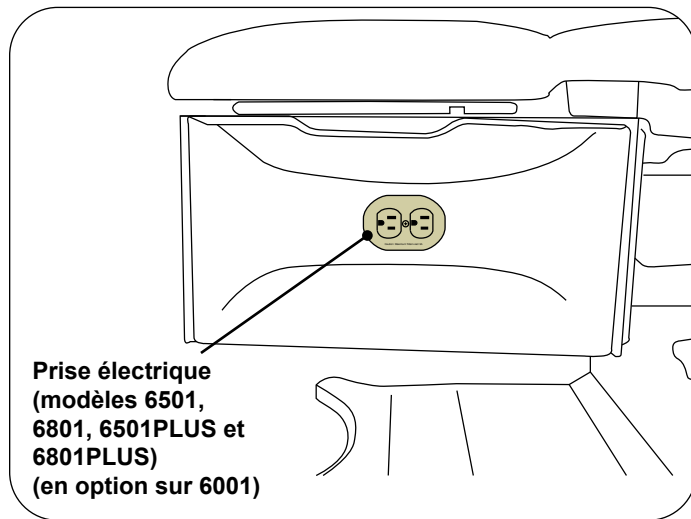

Prise électrique  
(modèles 6501,  
6801, 6501PLUS et  
6801PLUS)  
(en option sur 6001)

Figure 48. Prise électrique de la table

#### AVIS : Capacité maximale de la prise

Le branchement d'un appareil d'une consommation supérieure à 2 A dans la prise sur le côté de la table peut faire sauter le fusible à l'arrière de la table.

### Option de mobilité EasyGlide (proposée sur tous les modèles PLUS)

Pour actionner le mécanisme de mobilité EasyGlide (déployer les roues de la table pour la déplacer dans la salle d'examen) :

1. Vérifier que la table est sous tension (cordon d'alimentation branché).
2. Trouver le commutateur d'activation EasyGlide à l'avant de la table, sous le coussin de l'assise.
3. Tourner le commutateur vers la droite jusqu'en position haute, comme à la Figure 49, face à l'icône de déplacement de la table.



Figure 49. Commutateur de l'option de mobilité EasyGlide

4. Attendre que les roues centrales soient abaissées (jusqu'à six secondes). Une fois que les roues commencent à se déployer, le commutateur tournant s'illumine.

## FUNCTIONNEMENT (SUITE)

Une fois le mécanisme EasyGlide déployé, la table peut être tournée et déplacée dans la salle d'examen pour faciliter le nettoyage et la mise en place d'autres appareils médicaux nécessaires aux examens. La position de l'assise peut être réglée afin que les poignées d'assistance soient à une hauteur confortable lorsqu'on déplace la table d'examen. Saisir l'avant des poignées d'assistance pour déplacer la table (Figure 50).

**REMARQUE :** Si la table n'est pas équipée de poignées d'assistance, la tirer ou la pousser par l'avant du coussin de l'assise. Ne pas soulever le dessous de l'assise.



Figure 50. Position des poignées d'assistance pour déplacer la table

Pour désactiver l'option de mobilité EasyGlide (rétracter les roues de la table et bloquer son déplacement) :

1. Vérifier que la table est sous tension (cordon d'alimentation branché).
2. Trouver le commutateur d'activation EasyGlide à l'avant de la table, sous le coussin de l'assise.
3. Tourner le commutateur vers la gauche jusqu'en position basse (face à l'icône d'immobilisation de la table). Lorsque les roues sont complètement rétractées, le commutateur n'est plus illuminé.

### Option de mobilité EasyGlide: Avertissements/Attention/AVIS

	<p><b>AVERTISSEMENT : Risque de chute</b> La fonction de mobilité n'est pas destinée à être utilisée avec un patient sur la table.</p>
--	--

	<p><b>AVERTISSEMENT : Risque de pincement</b> Avant et pendant tout déplacement, écarter les personnes et équipements de la table afin d'éviter tout risque de blessure et de dommages matériels. L'option de mobilité peut rester active même si le commutateur n'est pas illuminé.</p>
--	--

	<p><b>ATTENTION : Risque de pincement</b> Déplacer la table d'examen uniquement avec les tiroirs de rangement, le plan de travail et le repose-jambes rentrés/repliés.</p>
--	--

	<p><b>ATTENTION : Risque de pincement</b> En cas de coupure d'alimentation, la fonction de mobilité reste dans son état actuel. L'option de mobilité peut rester active même si le commutateur n'est pas illuminé.</p>
--	--

<b>AVIS</b>	
<p>L'option de mobilité EasyGlide permet de déplacer la table d'examen pour le nettoyage et la désinfection ou pour faire de la place pour d'autres appareils dans la salle d'examen. Pour transférer la table hors de la salle d'examen, se reporter aux instructions d'installation figurant dans ce document.</p>	

<b>AVIS</b>	
<p>Pour assurer un fonctionnement optimal, ne pas activer la fonction de retour en fauteuil en même temps qu'on engage ou qu'on désengage l'option de mobilité EasyGlide.</p>	

	<p><b>ATTENTION</b> L'option de mobilité EasyGlide est conçue pour être utilisée sur des sols plans ou essentiellement plans. L'utilisation sur des surfaces non planes peut entraîner des mouvements imprévus.</p>
--	---

	<p><b>ATTENTION</b> Ne pas tourner le commutateur EasyGlide alors que la table n'est pas branchée, afin que le commutateur n'indique un état incorrect.</p>
--	---

	<p><b>ATTENTION : Démarrage automatique</b> Lors du branchement de la table, l'option de mobilité EasyGlide passe à l'état indiqué si ce n'est pas déjà le cas.</p>
--	---

<b>AVIS</b>	
<p>L'option de mobilité EasyGlide fonctionne mieux avec le dossier relevé.</p>	

<b>AVIS</b>	
<p>L'interrupteur marche/arrêt est sans effet sur l'option de mobilité EasyGlide.</p>	

## ENTRETIEN



### AVERTISSEMENT : Risque de choc électrique

Pour écarter les risques de choc électrique, couper l'alimentation en débranchant la fiche de la prise murale avant de procéder à l'entretien de la table.



### ATTENTION

Utiliser la prise uniquement pour alimenter des appareils destinés à être inclus dans le circuit électrique médical.

### AVIS : Mauvais fonctionnement de la table

En cas de problème de fonctionnement de la table, débrancher immédiatement le cordon d'alimentation et aider le patient à se lever de la table. Faire réparer la table avant de la réutiliser.

## Soins de la table

### AVIS : Essuyer immédiatement les déversements accidentels!

Le matériau des coussins résiste à la majorité des taches courantes en milieu médical, mais il peut être endommagé par les solvants et les teintures. Essuyer immédiatement tout liquide renversé sur les coussins.

## Entretien préventif

### AVIS : Visserie desserrée et composants endommagés

L'absence de contrôles périodiques de la table peut entraîner des dommages matériels.

- Contrôler la table tous les 6 mois.
- Contrôler régulièrement le cordon électrique pour s'assurer qu'il ne présente aucune coupure ou autres dommages.
- Contrôler les fonctions mécaniques pour s'assurer de leur bon fonctionnement.
- Vérifier que toute la visserie est présente et correctement serrée.
- Lubrifier les pièces mobiles (telles que la charnière arrière) avec un lubrifiant au silicone de qualité alimentaire. Couvrir les surfaces voisines pour les protéger des projections. Essuyer l'excès de lubrifiant. Ne pas lubrifier la barre ni le mécanisme de blocage des étriers.

L'utilisation de produits nettoyants inadaptés sur les tables Brewer peut réduire la durée de service. Veiller à toujours suivre les directives de nettoyage de Brewer. Les directives les plus récentes peuvent être consultées à l'adresse [brewercompany.com/resources/product-manuals/](http://brewercompany.com/resources/product-manuals/).

## Mise au rebut

Veiller à respecter les directives en vigueur pour éliminer ce produit comme il se doit.

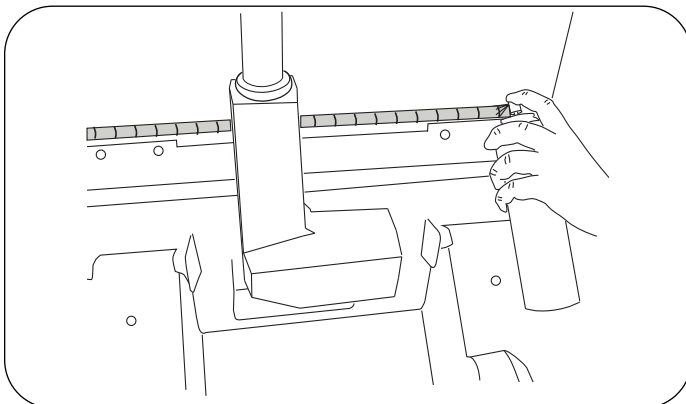


Figure 51. Lubrifier la charnière du dossier

## SERVICE APRÈS-VENTE

**AVERTISSEMENT : Risque de choc électrique**

Pour écarter les risques de choc électrique, couper l'alimentation en débranchant la fiche de la prise murale avant de procéder à l'entretien de la table.

**Remplacement du fusible**
**Tables à tiroir chauffant et à prise  
(modèles 6001 et 6001PLUS avec prise, 6501,  
6801, 6501PLUS et 6801PLUS)**


**Figure 52. Les tables à prise électrique et tiroir chauffant utilisent un fusible unique de 3 A**

1. Débrancher la table de la prise murale.
2. Le fusible se trouve à l'arrière de la table, près du cordon d'alimentation.
3. Appuyer sur le capuchon du porte-fusible avec un tournevis plat et tourner d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer le capuchon et le fusible.
4. Remplacer le fusible par un fusible Brewer 2102490, 3 A 250 V.
5. Enfoncer le fusible neuf dans le capuchon.
6. Enfoncer le capuchon avec le fusible dans le porte-fusible et tourner d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre pour le mettre en place.
7. Brancher la table sur la prise murale.
8. Vérifier le bon fonctionnement du tiroir chauffant et de la prise électrique.

**Tables à tiroir chauffant seulement  
(modèles 6001 et 6001PLUS sans prise)**


**Figure 53. Les tables à tiroir chauffant mais sans prise électrique utilisent deux fusibles de 1 A**

1. Débrancher la table de la prise murale.
2. Les fusibles se trouvent à l'arrière de la table, près du cordon d'alimentation.
3. Appuyer sur le capuchon d'un porte-fusible avec un tournevis plat et tourner d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer le capuchon et le fusible.
4. Remplacer le fusible par un fusible Brewer 100777, 1 A 250 V.
5. Enfoncer le fusible neuf dans le capuchon.
6. Enfoncer le capuchon avec le fusible dans le porte-fusible et tourner d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre pour le mettre en place.
7. Brancher la table sur la prise murale.
8. Vérifier le bon fonctionnement du tiroir chauffant.







**ACCESSOIRES**

Pour voir la liste des accessoires actuellement proposés, consulter le site web de Brewer ([www.brewercompany.com](http://www.brewercompany.com)).

**MODÈLES DE CORDON D'ALIMENTATION**

**AVIS**

Cette table doit être utilisée avec un cordon d'alimentation fourni par Brewer. L'utilisation de tout autre cordon invaliderait la garantie sur les composants électriques.

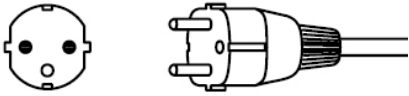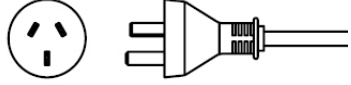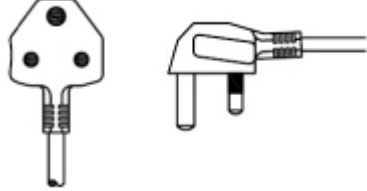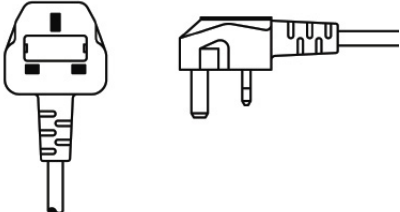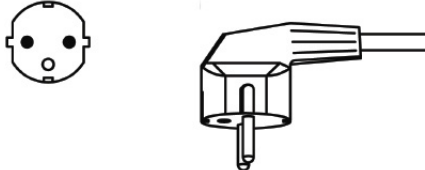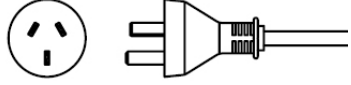Type de fiche du cordon d'alimentation	Réf. Brewer	Pays d'utilisation
 <p>EU1-16P, CEE 7/7</p>	101941	Thaïlande Laos Vietnam Philippines Indonésie Cambodge
 <p>CH1-10P</p>	101942	Chine Mongolie
 <p>UK2-15P (BS 546 A)</p>	101493	Macao Bangladesh
 <p>UK1-13P, -BS 1363A</p>	101944	Myanmar Hong Kong Singapour Malaisie
 <p>KSC-8305 SK1-16P</p>	101945	Corée du Sud
 <p>AU1-10P</p>	2102545	Australie

## GARANTIE

### **Pour plus d'information sur la garantie Brewer :**

Votre produit Brewer est facile à enregistrer. Il suffit d'aller à la page [brewercompany.com/warranty-registration](https://brewercompany.com/warranty-registration), de remplir les champs d'information et de cliquer sur SUBMIT pour envoyer. En enregistrant votre produit aujourd'hui, vous protégez mieux votre investissement à l'avenir.