


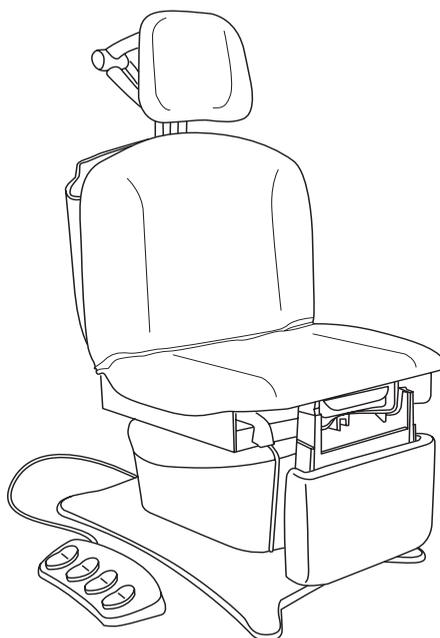

Modèle 7500

Manuel d'installation et d'utilisation



<i>Informations importantes</i>	2	<i>Opération</i>	8
<i>Informations de sécurité</i>	3	<i>Réglages de la table</i>	14
<i>Identification des composants</i>	3	<i>Entretien</i>	19
<i>Caractéristiques</i>	4	<i>Garantie</i>	20
<i>Installation</i>	5	<i>Accessoires</i>	20



The Brewer Company, LLC
N88 W13901 Main Street, Suite 100
Menomonee Falls, WI 53051 États-Unis

INFORMATIONS IMPORTANTES

Général

Veillez lire attentivement et comprendre toutes les instructions d'utilisation, les consignes de sécurité et les consignes d'entretien contenues dans ce manuel avant d'utiliser la table. Familiarisez-vous avec toutes les fonctions de la table avant de l'utiliser avec un patient.

Le Brewer AssistPRO La table de procédure électrique est conçue pour assurer le positionnement et le soutien des patients lors des examens généraux effectués par des professionnels de la santé qualifiés.

La table AssistPRO est principalement utilisée dans les salles d'examen pour les examens généraux et les procédures mineures. La grande variété de positions offertes par six mouvements motorisés, un repose-jambes réglable, un appui-tête réglable, des étriers et un bac de traitement, créent une table de positionnement du patient sûre et pratique pour la plupart des examens et procédures effectués dans le cabinet du médecin.

La table s'ajuste facilement à une grande variété de positions grâce à la commande au pied ou à la pendentif à main fournies. Sa hauteur est réglable de 48 à 102 cm. L'assise peut être inclinée de 30°, de la position horizontale normale à 30°. Le dossier est réglable de la position allongée à 85° pour une position assise. Le repose-jambes est réglable de la position verticale pour une position assise à la position horizontale pour une position allongée.

L'AssistPRO est également capable de mémoriser six positions préférées. Grâce à une méthode de programmation intuitive en deux étapes, l'utilisateur peut rappeler n'importe quelle position programmée d'une simple pression sur un bouton.

En plus des positions à commande électronique mentionnées ci-dessus, plusieurs réglages manuels sont disponibles:

1. Le repose-jambes peut être réglé manuellement de la position assise à la position à genoux.
2. Avec la table en position horizontale, le repose-jambes peut être allongé de 5 pouces supplémentaires pour les patients de grande taille.
3. Les étriers peuvent être étendus et positionnés manuellement à l'infini dans la plage de déplacement latéral.
4. Un bac de traitement amovible est rangé sous l'avant du siège et peut être retiré pour être utilisé pendant les examens.

5. L'appui-tête peut être ajusté à une variété de positions du patient à l'aide de trois leviers de verrouillage à pince.
6. Le dossier intègre un rouleau de papier auto-stockable.

Service

Si vous avez besoin d'aide pour l'installation ou le fonctionnement de votre Brewer tableau, appelez le service client de Brewer au **1-800-558-8777**. Notre personnel qualifié vous aidera à résoudre le problème directement par téléphone. Si une intervention est nécessaire, un technicien agréé se rendra sur place.

Veillez remplir les informations suivantes pour toute question concernant votre appareil auprès de Brewer Company ou de votre distributeur. Voir la figure 1 pour connaître l'emplacement du modèle et du numéro de série.

Date d'achat _____

Numéro de série _____

Numéro de modèle _____

Autorisé
Nom du concessionnaire _____

Concessionnaire
Numéro de téléphone _____

Adresse du concessionnaire _____

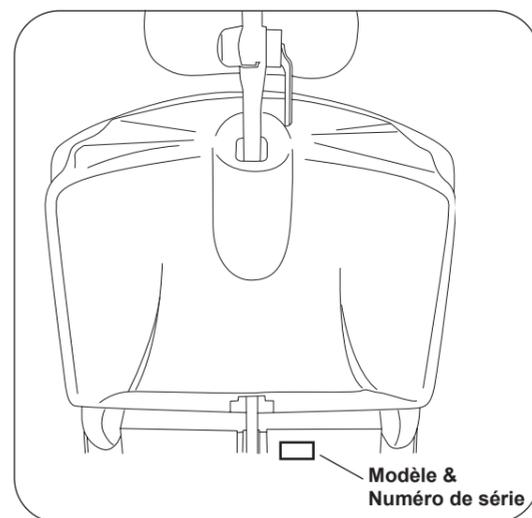


Figure 1. Emplacement du modèle et du numéro de série

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

Informations de sécurité

La principale préoccupation de The Brewer Company est que l'exploitation et l'entretien des équipements soient effectués dans le respect de la sécurité des patients et du personnel soignant. Pour garantir un fonctionnement sûr et fiable :

- Lisez et comprenez toutes les instructions de ce manuel avant de tenter d'installer ou d'utiliser l'appareil.
- S'assurer que le personnel concerné est informé du contenu du manuel. Cette responsabilité incombe à l'acheteur.
- Assurez-vous que ce manuel est situé à proximité de la table ou, si possible, fixé en permanence sur la table.



Ceci est le symbole d'alerte de sécurité. Il est utilisé pour vous avertir des risques potentiels de blessures corporelles. Respectez tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole pour éviter tout risque de blessure, voire de décès.



DANGER Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, volonté entraîner la mort ou des blessures graves.



AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.



PRUDENCE indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures mineures ou modérées.

IDENTIFICATION DES COMPOSANTS

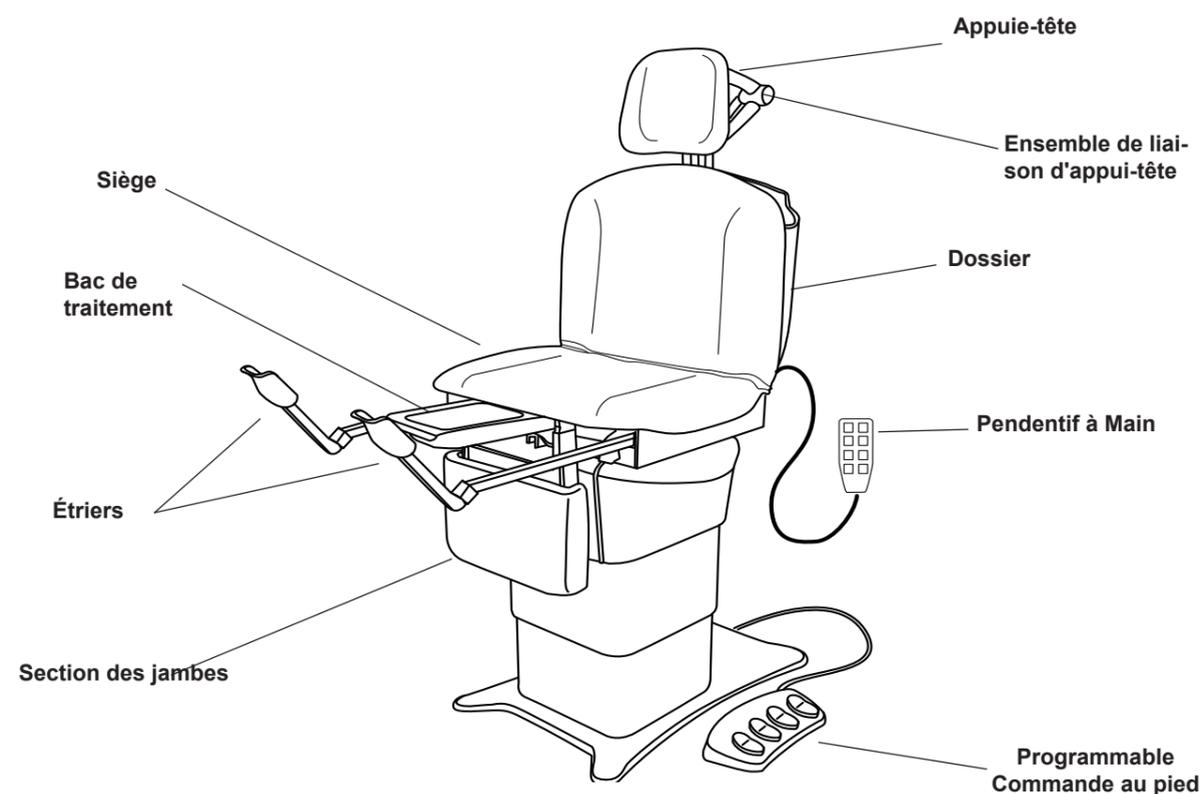


Figure 2. Présentation des composants

CARACTÉRISTIQUES

Poids de la table 550 livres

Capacité de charge (maximale)

- Siège/Dossier 450 livres
- Repose-jambes (à plat et à genoux) 450 livres
- Appuie-tête 100 livres

Gamme de sections dossiers 0° (horizontal) à +85° ± 5°

Plage de hauteur du plateau de table

19 ± 0,5 po à 40 ± 1,0 po

Gamme de sections de jambes

0° (horizontal) à 90° (vertical)

Plateau de table Plage d'inclinaison

0° (horizontal) à +30° ± 5° (pied levé)

Dimensions

- Appuie-tête coussin 13 po de largeur x 11 po de hauteur
- Dessus coussin 28,0 po de largeur x 44,5 po de longueur
- Coussin
- Repose-jambes 16,5 po de largeur x 11,25 po de hauteur
- Longueur totale 69 pouces de long
- Avec appui-tête/
Repose-pieds allongé 90 pouces de long

Puissance électrique nominale

115 VCA nominal, 60 Hz, 5,8 A maximum

Cycle de service (10 %) 2 minutes allumées / 18 minutes

éteintes (temps de fonctionnement du moteur)

Pouvoir Corde

- Longueur Extension de 70 po (minimum) à partir de tableau.
- Type Détachable
- Conducteurs 18 AWG / 3 conducteurs
- Qualité Prise de qualité hospitalière

Type de protection contre les chocs électriques

Classe Classe 1 Mise à la terre

Pièces appliquées au patient Type B

Type de protection contre pénétration d'eau

- Table Ordinaire
- Commande au pied IPX1

Tailles des rouleaux de papier

- Régulier 18 po x 3,5 po
- Long 21 po x 3,5 po

Certifications * UL60601-1; CAN-CSA C22.2 n° 601.1

Conditions de fonctionnement

- Plage de température 65 °F à 85 ° F
- Plage d'humidité 10 % à 90 %

Transport et stockage

- Plage de température -20°F à 85°F
- Plage d'humidité 10 % à 90 %



*Classé aux États-Unis et au Canada par les normes énumérées ci-dessus.

AVERTISSEMENT

Risque d'explosion/d'incendie

N'utilisez pas cette table dans une atmosphère explosive ou riche en oxygène. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique

Lors d'une cautérisation ou d'un traitement similaire, le patient doit être isolé des parties métalliques de la table par un matériau non conducteur. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique.

AVIS

Certifications

Ce produit a été évalué en ce qui concerne les risques de choc électrique, d'incendie et de risques mécaniques uniquement conformément à la norme UL60601-1; CAN/CSA C22.2 No. 601.1

AVIS

Interférences électromagnétiques (EMI)

Ce produit est conçu et fabriqué pour minimiser les interférences électromagnétiques avec d'autres appareils. Cependant, si une interférence est constatée entre un autre appareil et ce produit, retirez l'appareil interférent de la pièce ou branchez ce produit sur un circuit isolé.

INSTALLATION

AVIS

Inspecter le carton et son contenu

Inspectez tous les cartons et leur contenu pour détecter tout dommage. Signalez immédiatement tout dommage au transporteur.

AVIS

Pas d'outils tranchants

Pour éviter d'endommager le coussin ou les surfaces peintes de la table, N'UTILISEZ PAS de couteau ou autre objet pointu pour ouvrir l'emballage.

Aperçu

Effectuez la séquence suivante dans l'ordre lors de la configuration de la table:

- Déballage
- Nivelier la table
- Installation du cordon d'alimentation
- Installation de la commande au pied
- Installation du pendentif à main

AVIS

Performances optimales de la table

Pour une performance optimale de la table, laissez-la reposer atteindre la température ambiante avant utilisation.

Déballage

1. À l'aide d'une clé plate de 1/2 po ou d'une douille, dévissez la table du patin d'expédition en bois en retirant les six boulons situés sous la base de la table; deux de chaque côté.

AVIS

Poids de la table jusqu'à environ 550 lb.

2. Retirez la table du patin de transport en la faisant glisser par l'avant. Veillez à soulever la table aux bons endroits, comme indiqué sur la Figure 3. Positionnez la table à l'emplacement souhaité dans la pièce.
3. Retirez le ruban adhésif des étriers (Figure 4). Retirez la glissière du bac de traitement et retirez le ruban adhésif des composants de l'ensemble du bac de traitement. Remettez la glissière du bac de traitement en position de rangement.

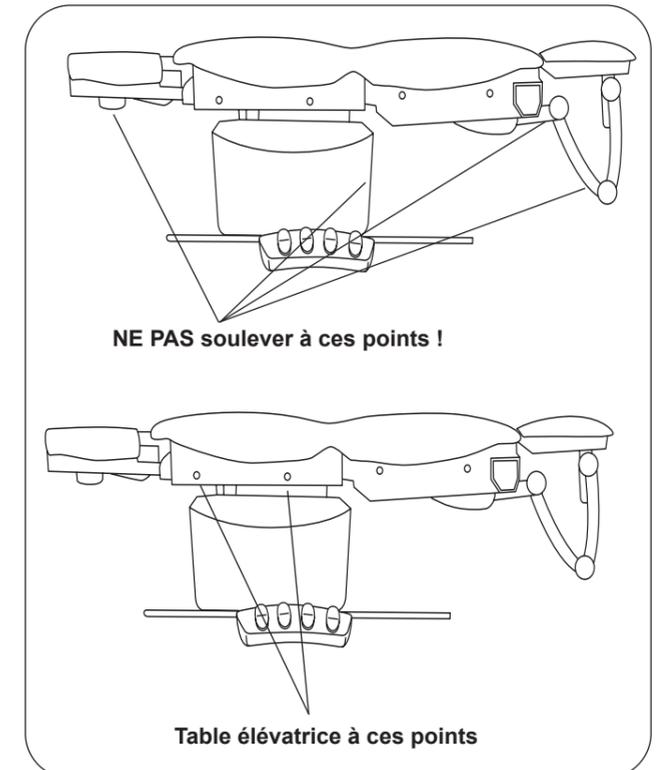


Figure 3. Points de levage de la table

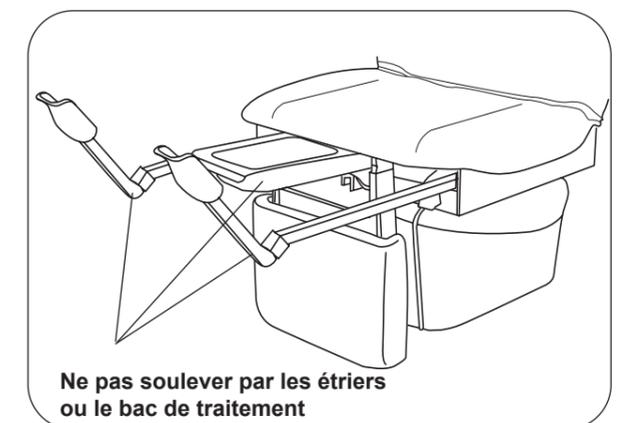


Figure 4. Étriers et bac de traitement

INSTALLATION (SUITE)

Niveler la table

Des patins de mise à niveau (Figure 5) sont situés à six endroits sous la base de la table. Ajustez les patins de mise à niveau pour obtenir une installation solide et plane.

AVIS

Prévenir les dommages au niveleur

Les niveleurs doivent rester dans la table et être complètement engagés d'au moins trois tours. Si les niveleurs ne sont pas complètement engagés dans la base, le filetage de la base et/ou du niveleur risque d'être endommagé.

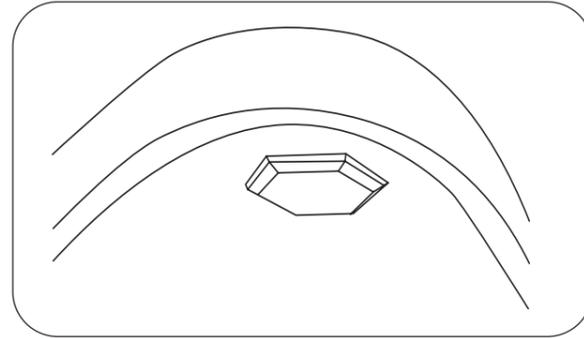


Figure 5. Patin de vis de nivellement (situé sous la table)

Installation du cordon d'alimentation

1. Retirez le cordon d'alimentation du carton d'expédition.

AVIS

Confirmer la tension et le type de prise

Consultez la page des spécifications pour connaître les caractéristiques électriques de cet appareil. La fiche de terre à trois broches du cordon d'alimentation de la table doit être branchée sur une prise 115 V CA à trois broches, mise à la terre, non isolée et correctement polarisée.

2. Branchez l'extrémité femelle du cordon d'alimentation dans la prise de la table (Figure 6). Assurez-vous que l'extrémité de la fiche est correctement orientée par rapport à la prise. Branchez l'extrémité mâle du cordon d'alimentation dans une prise de terre de 115 volts.

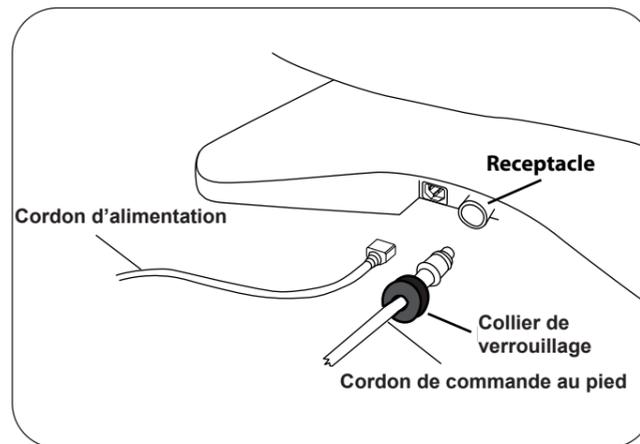


Figure 6. Prises du cordon d'alimentation et du cordon de commande au pied

Installation de la commande au pied

1. Retirez la commande au pied du carton d'expédition.
2. Insérez le cordon dans la prise de la commande au pied sur la table (Figure 6). Assurez-vous que la languette de la fiche est alignée avec la rainure de la prise et que la fiche est bien en place.
3. Enfilez le collier de verrouillage sur le prise.
4. Assurez-vous que l'interrupteur marche/arrêt situé sur le capot du dossier est en position « ON ». Voir la Figure 7.



Figure 7

Interrupteur marche/arrêt à pédale et à pendentif à main

INSTALLATION (SUITE)

Installation du pendentif à main

1. Retirez le pendentif à main du sac d'expédition.
2. Insérez le cordon dans la prise de la pendentif à main située sur le carénage du dossier (Figure 8). Assurez-vous que la languette de la fiche est alignée avec la rainure de la prise et que la fiche est bien en place.
3. Enfilez le collier de verrouillage sur le réceptacle.

AVIS

La commande au pied et la pendentif à main sont résistantes à l'humidité et fonctionnent à basse tension. Pour éviter tout dommage temporaire ou permanent, ne les immergez pas dans l'eau ou tout autre liquide.

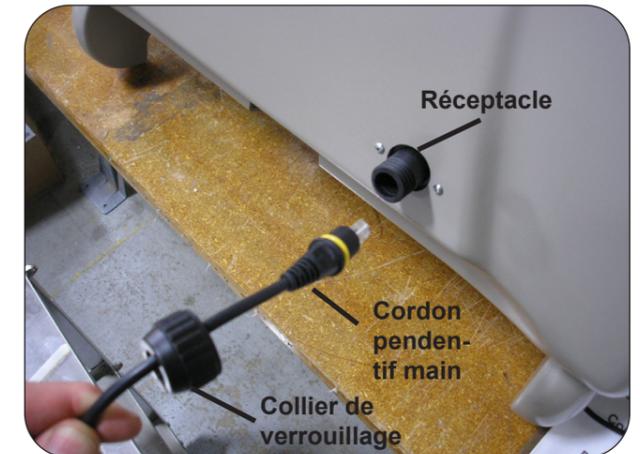


Figure 8

Interrupteurs marche/arrêt

1. La table est équipée de deux interrupteurs marche/arrêt qui coupent l'alimentation principale de la table.
2. Les interrupteurs sont situés en haut à gauche et à droite du carénage du dossier. Voir la Figure 9.
3. En position « Marche », l'interrupteur est allumé en vert. Les deux interrupteurs doivent être allumés pour que la table fonctionne.



Figure 9

AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

Après avoir installé ou déplacé la table, assurez-vous qu'aucun fil n'est endommagé ou exposé, ce qui pourrait entraîner un choc électrique.

OPÉRATION

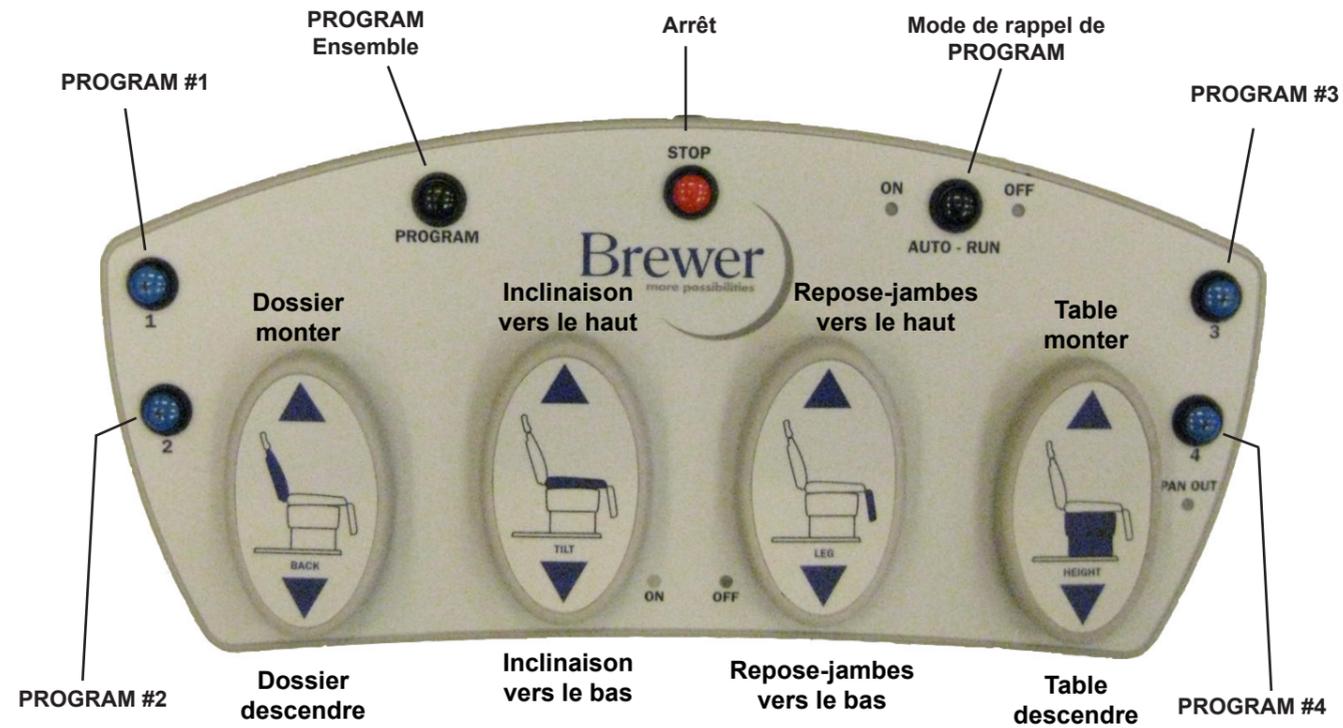


Figure 10

Contrôles

1. Voir la Figure 10 pour les identifications des pédales et des boutons sur la commande au pied
2. Voir la Figure 11 pour les identifications des boutons sur le pendentif à main

AVIS

Fonctionnement involontaire

Pour éviter toute manipulation accidentelle, éloignez tout objet étranger des commandes. Assurez-vous que les commandes ne sont pas placées sous le repose-jambes ou la tringlerie de l'appuie-tête.

FONCTIONNEMENT (SUITE)

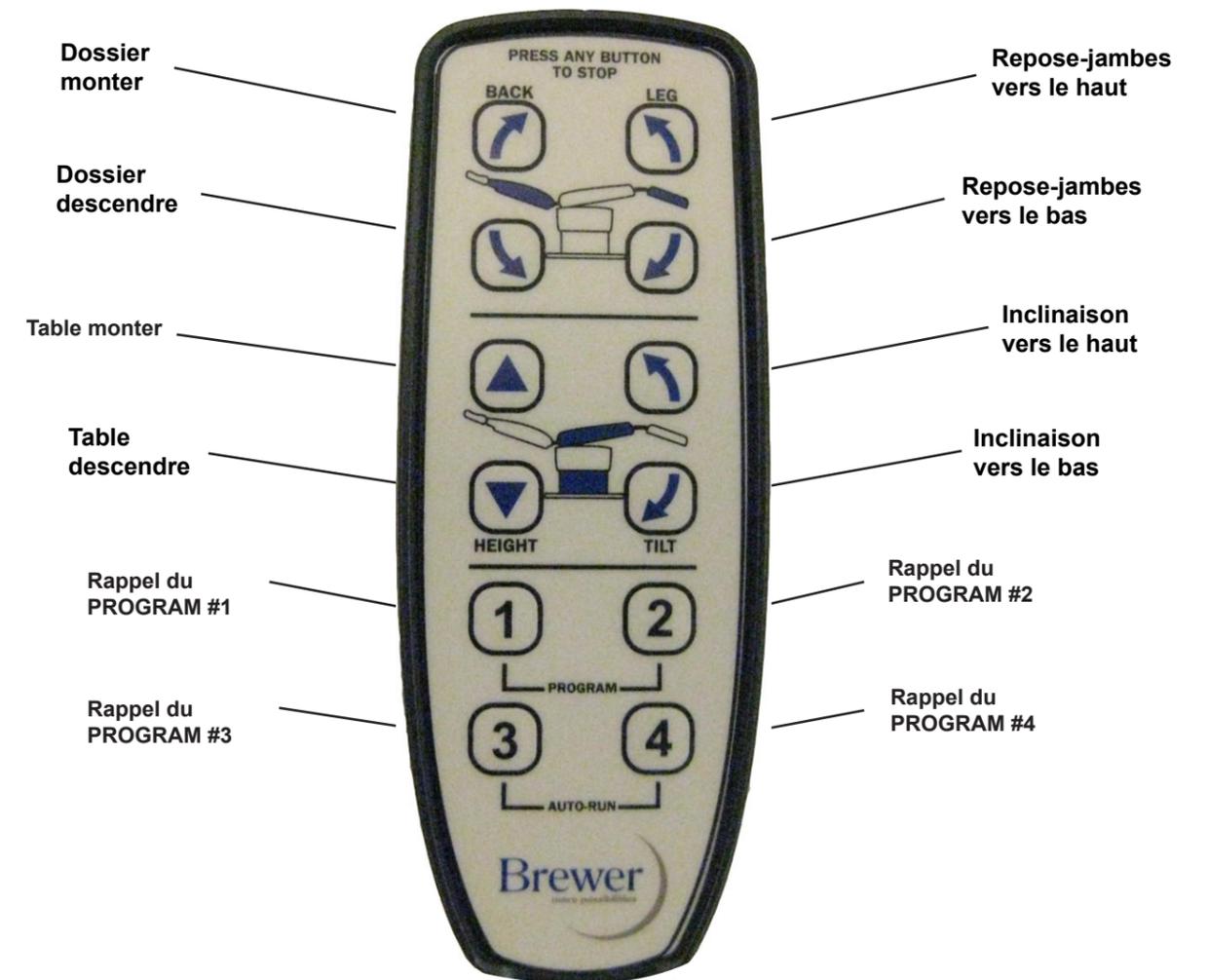


Figure 11

FONCTIONNEMENT (SUITE)

Bac de traitement

1. Pour exposer le bac de traitement à l'utilisation, saisissez la poignée du plateau et tirez jusqu'à ce que le plateau soit complètement déployé (Figure 11).
2. Le bac se retire facilement pour le nettoyage, le plateau étant entièrement déployé. Une fois propre, le bac doit être bien en place dans le plateau.
3. Poussez la poignée du plateau jusqu'à la butée pour ranger complètement le plateau de traitement après utilisation. Un léger clic se fera entendre juste avant que le plateau n'atteigne sa position de rangement complète. (Ce léger clic est produit par un interrupteur qui permet de relever le repose-jambes.)

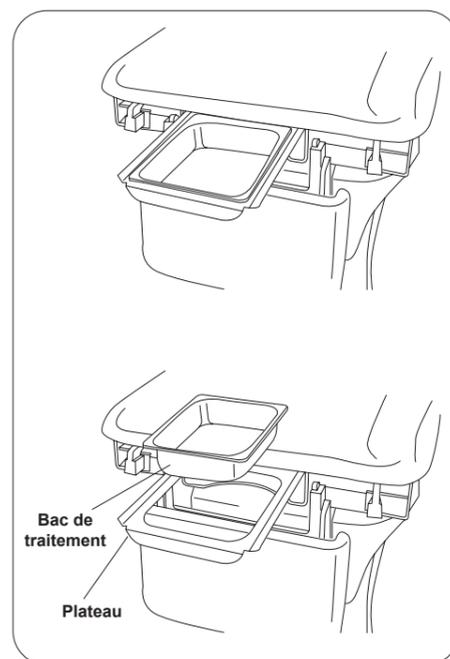


Figure 11. Bac de traitement

Positions des appuis-tête

1. Pour déplacer l'appui-tête, tournez les trois poignées en position ouverte. Déplacez l'appui-tête à l'emplacement souhaité. Tournez les trois poignées en position verrouillée, comme illustré à la Figure 12.
2. Chaque section de l'appui-tête peut être réglée indépendamment en tournant la poignée vers la position ouverte, en déplaçant la section souhaitée, puis en tournant la poignée vers la position fermée.

Avis: Assurez-vous que les trois poignées sont verrouillées. Une poignée est correctement verrouillée lorsqu'elle est poussée au-delà du centre et que la force de serrage la tire en position verrouillée et la maintient dans cette position.

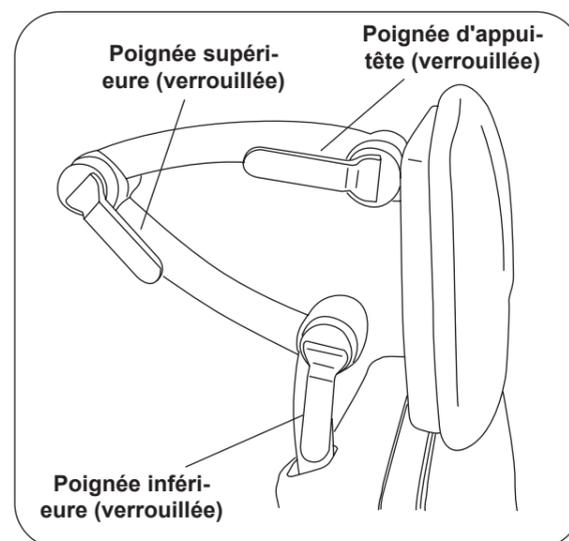


Figure 12. Poignées d'appui-tête

PRUDENCE

Assurez-vous que l'appui-tête est bien verrouillé avant utilisation. Un mauvais verrouillage des trois poignées pourrait entraîner la chute de l'appui-tête pendant l'intervention, ce qui pourrait entraîner des blessures graves.

FONCTIONNEMENT (SUITE)

Extension du repose-jambes

En position horizontale, le repose-jambes peut être allongé de 5 pouces pour augmenter la longueur totale de la table (Figure 13).

Soulevez le repose-jambes et tirez vers l'extérieur pour l'allonger. Pour le ramener à sa position la plus courte, soulevez-le et poussez-le complètement vers l'intérieur.

AVIS
Pour éviter d'endommager l'appareil, le repose-jambes doit être ramené à la position la plus courte avant de l'abaisser à la position verticale.

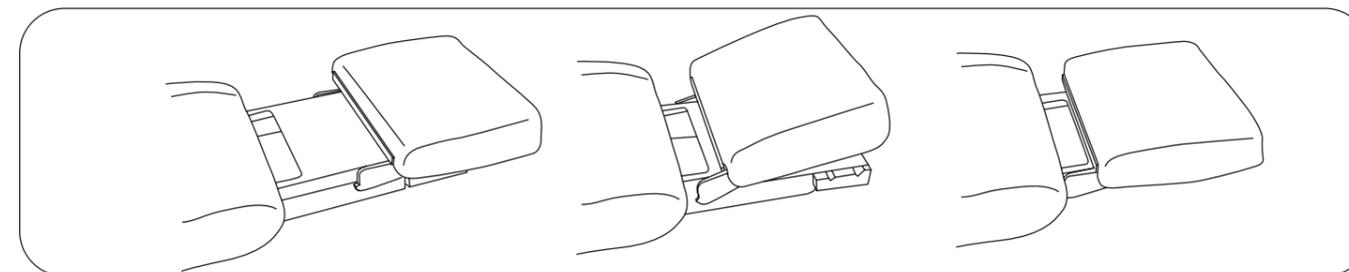


Figure 13. Extension du repose-jambes

Position à genoux avec repose-jambes

Le repose-jambes peut être tourné jusqu'à une position à genoux (Figure 14).

1. Saisissez le coussin du repose-jambes des deux côtés.
2. Faites pivoter le coussin vers le haut jusqu'à ce que la rotation s'arrête.
3. Faites glisser le repose-jambes vers le bas et faites pivoter le coussin vers le bas pour enclencher la butée. Deux positions de hauteur sont disponibles.

AVIS
Assurez-vous que le repose-jambes est engagé avec les butées
Assurez-vous que le coussin repose-jambes est bien engagé dans les butées des deux côtés. Lorsqu'il est correctement engagé, le coussin repose-jambes est parallèle au sol.

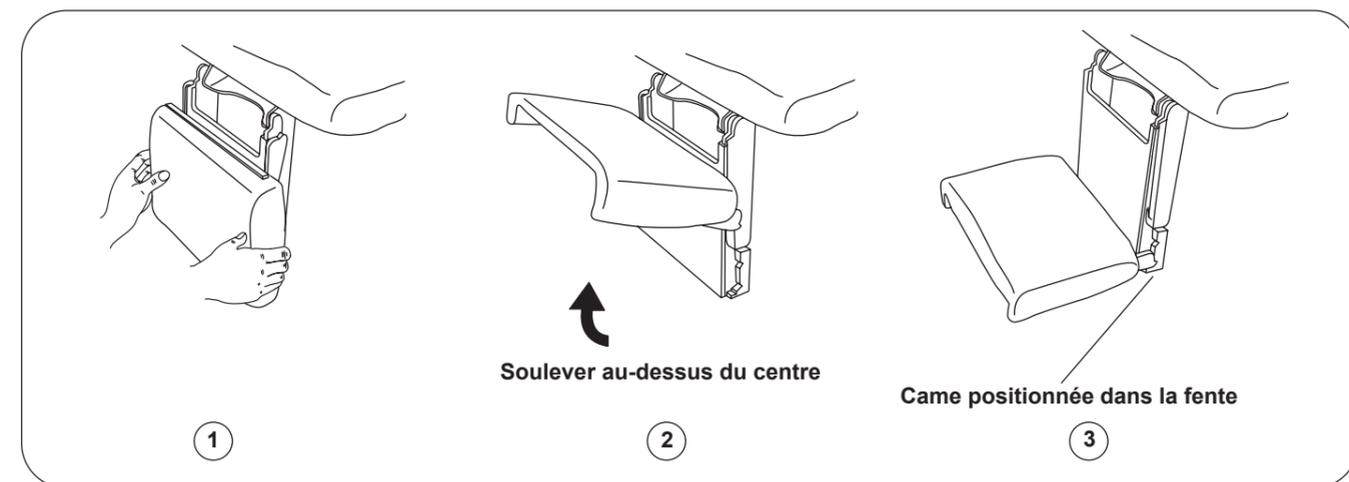


Figure 14. Position à genoux sur le repose-jambes

FONCTIONNEMENT (SUITE)
Étriers réglables
UTILISATION DES ÉTRIERS

1. Pour actionner les étriers, saisissez-les par leur extrémité et tirez-les hors de la table. Soulevez-les légèrement tout en les faisant glisser (Figure 15).

Avis: Toute pression exercée vers le bas lors du retrait de l'étrier de la table peut rendre son déplacement difficile. Cette résistance est normale et fait partie du mécanisme de verrouillage par friction de l'étrier.

2. Dépliez l'étrier vers le haut jusqu'à la position complètement ouverte.
3. Ajustez l'étrier à la longueur souhaitée en le faisant glisser vers l'intérieur ou vers l'extérieur.

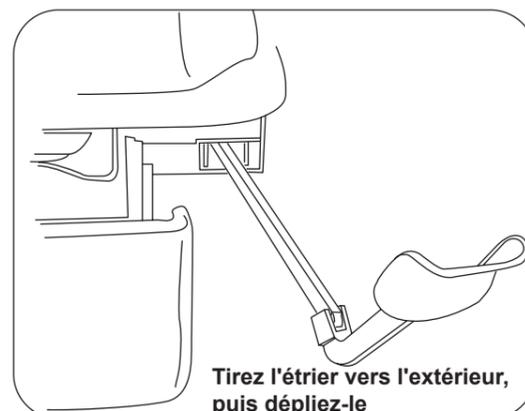


Figure 15. Fonctionnement des étriers

RÉGLAGE LATÉRAL DE L'ÉTRIER

1. Soulevez l'extrémité de l'étrier, puis faites-le pivoter vers l'extérieur à la position souhaitée (Figure 16).
2. Lorsque la position souhaitée est atteinte, abaissez l'étrier pour enclencher le mécanisme de verrouillage latéral.
3. Vérifiez que le mécanisme de verrouillage latéral est engagé en essayant de faire tourner l'ensemble de l'étrier sans soulever l'extrémité de l'étrier.

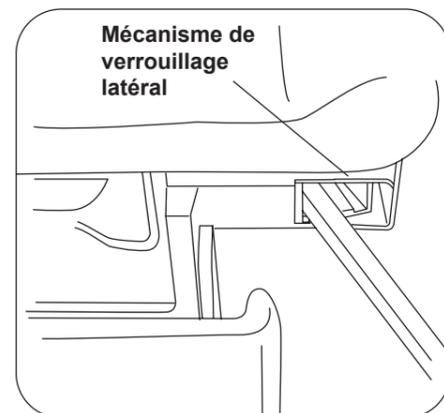


Figure 16. Réglage latéral de l'étrier

STOCKAGE DES ÉTRIERS

1. Pour ranger les étriers dans la table, saisissez l'extrémité de l'étrier et tirez-le droit jusqu'à son extension complète (Figure 17).
2. Repliez l'étrier contre la barre, puis faites-le pivoter vers la position latérale la plus intérieure et faites-le glisser vers la position rangée.



Figure 18. N'apposez aucune pièce jointe !

AVIS
Utiliser l'étrier uniquement comme prévu

N'utilisez aucune partie de l'étrier pour fixer un dispositif (Figure 18). La garantie serait annulée. Si des béquilles sont nécessaires, commandez les adaptateurs de montage, les pinces et les rails indiqués dans la section Accessoires.

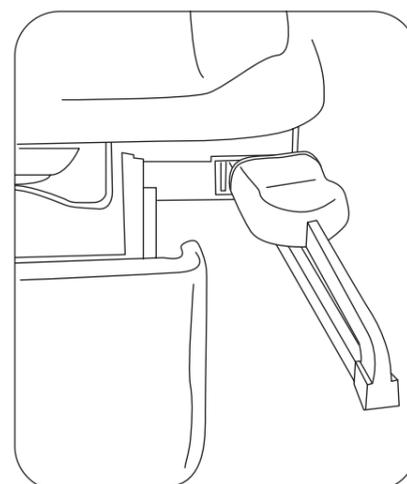


Figure 17. Rangement des étriers

FONCTIONNEMENT (SUITE)
Rouleau de papier

Pour changer un rouleau de papier, insérez le papier dans la fente du coussin du dossier et placez le rouleau de papier dans le support (Figure 19).

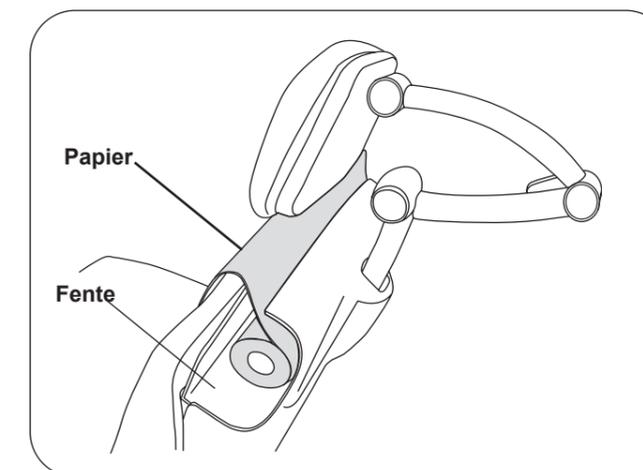


Figure 19. Rouleau de papier

RÉGLAGES DE TABLE

AVERTISSEMENT

Zone non dégagée Danger

Avant d'entamer le mouvement, éloignez le personnel et l'équipement de la table pour éviter les blessures corporelles ou les dommages à l'équipement.

AVIS


Évitez le fonctionnement continu

Si la table est utilisée en continu et que la température de fonctionnement autorisée dépasse celle autorisée, la commande s'arrêtera. Si le fonctionnement normal cesse, n'essayez pas d'utiliser la table. Laissez-la refroidir 10 à 15 minutes avant de la réutiliser. La commande se réinitialise automatiquement lorsqu'elle atteint une température de fonctionnement sécuritaire.

Hauteur de la table

Le plateau de la table peut être réglé à n'importe quelle hauteur entre 19 et 40 pouces (Figure 20).

1. Pour relever la table, maintenez enfoncée la fonction Table Monter jusqu'à ce que la hauteur souhaitée soit atteinte.
2. Pour abaisser la table, maintenez enfoncée la fonction Table Descendre jusqu'à ce que la hauteur souhaitée soit atteinte.

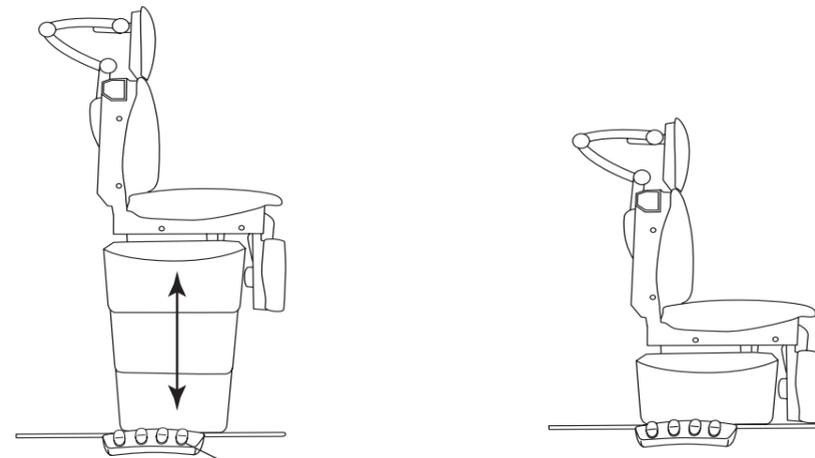

Contrôle de la hauteur de la table

Figure 20. Positionnement de la hauteur de la table

AVIS

Protection de limite de course de l'actionneur

Chaque fonction de commande s'arrête automatiquement lorsque la fin de course HAUT ou BAS est atteinte. Si la commande au pied est enfoncée alors que la course est atteinte, l'actionneur ne fonctionne pas. Des capteurs empêchent le moteur de l'actionneur de fonctionner lorsque la fin de course est atteinte, prévenant ainsi son usure.

RÉGLAGES DE TABLE (SUITE)

Positions Dossiers


Le dossier peut être réglé à n'importe quel angle entre l'horizontale et 85°. (Figure 21)

1. Pour régler le dossier d'une position de chaise (verticale) à une position horizontale, appuyez et maintenez la fonction Dossier Descendre jusqu'à ce que l'angle souhaité soit atteint.
2. Pour régler le dossier d'une position horizontale à une position chaise (verticale), appuyez et maintenez la fonction Dossier Monter jusqu'à ce que l'angle souhaité soit atteint.

AVIS

Actionneur dossiers - Pousser uniquement

Le dossier est positionné par un actionneur à poussée seule qui le soulève. Lorsqu'il est abaissé, l'actionneur se rétracte et la gravité provoque l'abaissement du dossier.

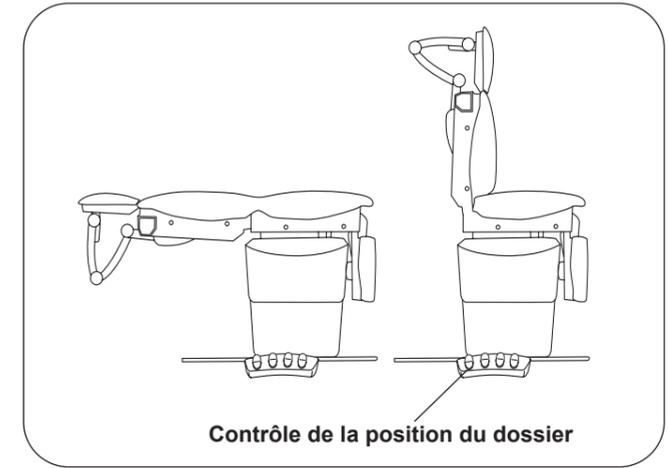

Contrôle de la position du dossier

Figure 21. Réglage du dossier

Fonction d'inclinaison

Le plateau de la table peut être incliné à n'importe quel angle entre horizontal et +30° (pied de table relevé). (Figure 22).

1. Pour incliner le pied de la table vers le haut, appuyez sur la fonction inclinaison vers le haut et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'angle souhaité soit atteint.
2. Pour incliner le pied de la table descendre, appuyez sur et maintenez la fonction inclinaison vers le bas jusqu'à ce que l'angle souhaité soit atteint.

AVIS

Espace libre pour la tringlerie de l'appui-tête

Soyez prudent lorsque vous inclinez la table pour éviter tout contact entre les la liaison de l'appui-tête et le sol ou d'autres objets. (Figure 23).



Contrôle de la fonction d'inclinaison

Figure 22. Fonction d'inclinaison

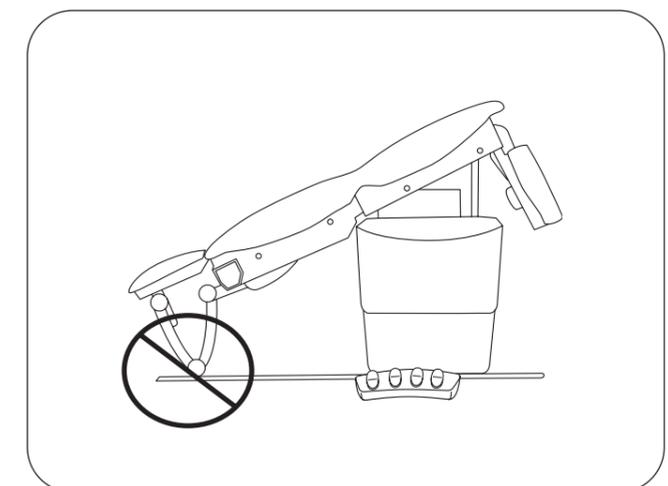


Figure 23. Ne pas Permettre à l'appui-tête d'entrer en contact avec des objets

RÉGLAGES DE TABLE (SUITE)

Positions du repose-jambes

Le repose-jambes est réglable de la position horizontale à la position verticale Figure 24.

1. Pour régler le repose-jambes d'une position verticale à une position horizontale, appuyez et maintenez la fonction repose-jambes vers le haut jusqu'à ce que l'angle souhaité soit atteint.
2. Pour régler le repose-jambes d'une position horizontale à une position verticale, appuyez et maintenez la fonction repose-jambes vers le bas jusqu'à ce que l'angle souhaité soit atteint.

AVIS

Le plateau de traitement doit être rangé

Le repose-jambes ne se lève pas si le plateau de traitement est déployé. Un voyant lumineux « Pan Out » s'allume sur la commande au pied. Appuyer sur la fonction de relèvement du repose-jambes fera clignoter le voyant et un double bip retentira. Si le repose-jambes ne fonctionne pas, vérifiez que le plateau de traitement est bien en position repliée.

AVIS

Actionneur de repose-jambes - Pousser uniquement

Le repose-jambes est positionné par un actionneur à poussée seule qui le soulève. Lorsqu'il est abaissé, l'actionneur se rétracte et la gravité fait descendre le repose-jambes.

Contrôle de la position du repose-jambes

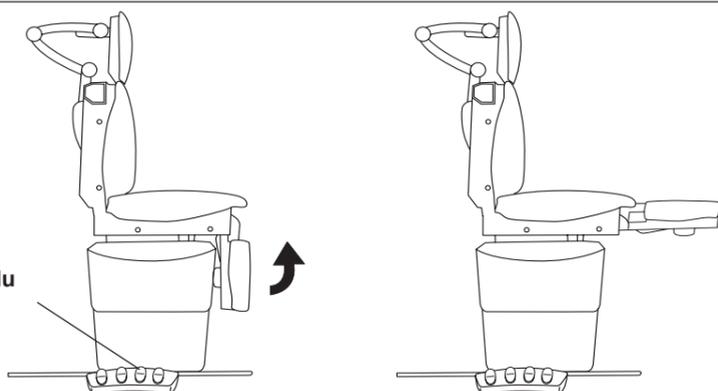


Figure 24. Positions du repose-jambes

RÉGLAGES DE TABLE (SUITE)

Utilisation de la fonctionnalité du PROGRAM

1. La table peut être programmée à l'aide de la pendentif à main ou de la commande au pied. Jusqu'à six positions différentes peuvent être programmées.
2. La table est déjà programmée en usine avec six positions préréglées. Voir la Figure 25.

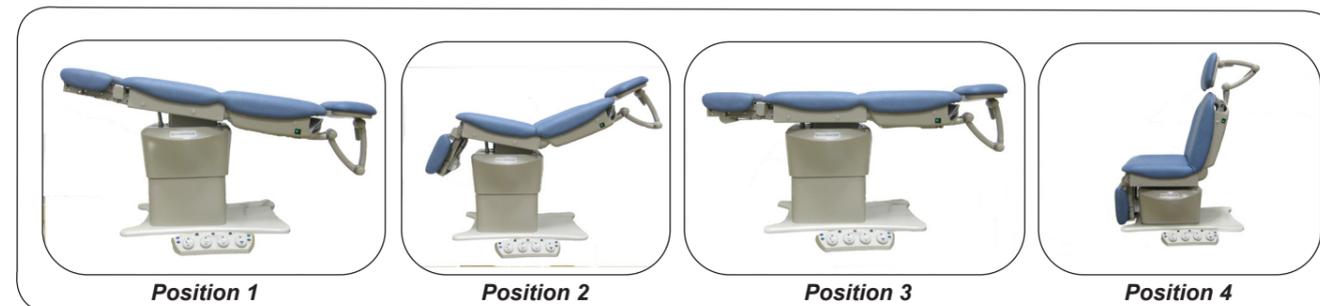


Figure 25

3. Appuyez sur l'un des quatre boutons bleus (voir Figure 11), numérotés de 1 à 4, pour déplacer la table vers la position programmée. Lorsque la table est dans une position programmée, le bouton bleu correspondant à cette position s'allume sur la commande au pied.

AVIS

Le plateau de traitement doit être rangé

Si le plateau de traitement est sorti, le rappel de position ne fonctionnera pas si la position prédéfinie nécessite de relever le repose-jambes. Cinq bips retentiront et le voyant « Pan Out » clignotera sur la commande au pied.

4. Le mode de rappel des positions programmées peut être défini par l'utilisateur. Le bouton noir AUTO-RUN (Figure 10) permet de régler le rappel Mode de rappel de programme Marche de rappel de PROGRAM Marche ou Mode de rappel de PROGRAM Arrêt
 - En mode Mode de rappel de PROGRAM Marche, une simple pression instantanée sur un bouton bleu de rappel de PROGRAM rappellera cette position.
 - En mode Mode de rappel de PROGRAM Arrêt, le bouton bleu de rappel de PROGRAM doit être maintenu enfoncé en continu jusqu'à ce que la table atteigne la position programmée.
5. Un voyant sur la commande au pied à côté du bouton noir AUTO-RUN indiquera si le mode de fonctionnement automatique est activé ou désactivé.
6. Pour changer le mode de rappel du PROGRAM, appuyez sur le bouton noir AUTO-RUN pendant cinq secondes, jusqu'à ce que deux bips soient entendus.
7. Lorsque la table se déplace en mode d'exécution automatique, le mouvement de la table peut être arrêté par:
 - a. Taper sur le bouton « Stop » sur la commande au pied.
 - b. Appuyer sur n'importe quelle pédale ou bouton de la commande au pied.
 - c. Appuyer sur n'importe quel bouton du pendentif à main.
 - d. En actionnant l'un des deux interrupteurs lumineux situés en haut du dossier. Voir Figure 9.

RÉGLAGES DE TABLE (SUITE)

Programmation de la table avec le Commande au pied

1. Déplacez la table à la position souhaitée à l'aide des pédales de la commande au pied. Appuyez sur le bouton noir « PROGRAM ». Les six boutons bleus s'allumeront pendant trois secondes. Appuyez sur l'un des boutons bleus (1 à 4). Le voyant bleu de ce bouton restera allumé et deux bips retentiront pour indiquer que la position a été mémorisée.
2. Déplacez la table vers une nouvelle position et répétez l'étape 1 pour les boutons bleus restants afin de stocker jusqu'à 4 positions programmées.
3. Pour rappeler l'une des six positions programmées, appuyez sur le bouton bleu (1 à 4) correspondant à cette position.
4. N'importe laquelle des positions programmées peut être modifiée en répétant l'étape 1 ci-dessus.



Programmation de la table avec le pendentif à main

1. Déplacez la table à la position souhaitée à l'aide des boutons de la pendentif à main. Appuyez simultanément sur les boutons « 1 » et « 2 » pendant trois secondes. Relâchez les deux boutons. Appuyez sur l'un des six boutons de programmation (1 à 4) de la pendentif à main pour enregistrer la position. Deux bips sonores retentissent.
2. Déplacez la table vers une nouvelle position et répétez l'étape 1 pour les trois positions de PROGRAM supplémentaires.
3. Pour rappeler l'une des six positions programmées, appuyez sur le bouton de PROGRAM (1 à 4) correspondant à cette position.
4. Pour modifier le mode de rappel du PROGRAM Mode à l'aide de la pendentif à main, appuyez simultanément sur les boutons numériques « 3 » et « 4 » pendant cinq secondes jusqu'à ce que deux bips soient entendus.

RÉGLAGES DE TABLE (SUITE)

Sécurité

La table est dotée d'une fonction de sécurité intégrée qui permet d'éviter de blesser le patient ou le médecin lors du rappel d'une position programmée dans l'exécution automatique. **SUR** « mode :

1. La table cessera de descendre une fois que le repose-jambes (en position repliée) atteindra une hauteur de six pouces au-dessus du sol.
2. Le repose-jambes cessera de s'abaisser pour fournir un espace d'un pouce entre l'actionneur du repose-jambes et le carénage de la colonne de levage.
3. L'inclinaison pelvienne cessera de s'élever après avoir atteint un angle de 10 degrés.

ENTRETIEN

Maintenance préventive

AVIS

Fixations desserrées et composants endommagés
Le non-respect des inspections périodiques de la table peut entraîner des dommages à l'équipement.

- Inspectez la table tous les 6 mois.
- Inspectez périodiquement les cordons électriques, de la commande au pied et du pendentif à main pour vous assurer qu'ils ne sont ni coupés ni endommagés.
- Inspectez les fonctions mécaniques pour assurer un fonctionnement satisfaisant.
- Vérifiez les fixations pour vous assurer qu'elles sont présentes et bien serrées.
- Lubrifiez les pièces mobiles (telles que les charnières du dossier, de l'inclinaison et du repose-jambes) avec un lubrifiant au silicone de qualité alimentaire.

AVIS

En cas de dysfonctionnement de la table, retirez immédiatement votre main ou votre pied des commandes, débranchez le cordon d'alimentation de la prise et aidez le patient à descendre de la table. Réparez la table avant utilisation.



AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique
Débranchez l'alimentation en retirant la fiche de la prise murale avant d'entretenir la table.

Entretien de la table

AVIS

Essayez immédiatement les déversements!
Le coussin résiste à la plupart des taches médicamenteuses, mais peut être endommagé par les solvants et les colorants. Éliminez immédiatement tout liquide renversé sur le coussin.

Pour connaître les dernières directives de nettoyage, visitez :
www.brewercompany.com

GARANTIE

Pour obtenir des informations sur la garantie du brasseur:

Visitez www.brewercompany.com ou contactez le service client de Brewer au 1-800-558-8777.

ACCESSOIRES

Vous trouverez ci-dessous les accessoires autorisés à être utilisés avec cette table.

Description	Numéro de commande	Utilisation/Restrictions
Plateau d'urologie avec tuyau et seau	100253	Capture les fluides de manière pratique et sûre pendant les procédures urologiques.
Rails latéraux (qté 2)	99501	Permet de fixer des accessoires. Peut être fixé au siège ou au dossier.
Pince à douille universelle (qté 1)	99502	Utilisé pour monter des béquilles articulées de luxe pour genoux sur un rail d'accessoires.
Support d'éclairage Welch Allyn IV (installé par le client)	102025	Pour le montage de la lampe Welch Allyn IV.
Barres d'appui (qté 2)	99497	Nécessite des rails latéraux 99501 pour le montage sur le siège.
Planche à bras articulé	99499	Nécessite des rails latéraux 99501 pour le montage sur le dossier.

Les éléments suivants sont requis pour l'accessoire de béquille articulée pour genou :

Béquilles articulées de luxe pour genoux	99504	Permet un positionnement optimal des jambes pour faciliter l'examen. Contient une béquille pour genou gauche et une béquille pour genou droit.
Rails latéraux (qté 2)	99501	Fournit un point de fixation pour les pinces de béquilles de genou.
Pince à douille universelle (qté 1)	99502	Fixation de la béquille au rail latéral. Commandez deux (2) colliers de serrage universels 99502.