

INSTALLATION

Aperçu

Effectuez la séquence suivante dans l'ordre lors de la configuration de la table:

- Déballage
- Nivellement de la base
- Installation de la pédale de commande
- Installation du coussin

Déballage

Avis: Inspectez toutes les boîtes et leur contenu pour détecter tout dommage. Signalez immédiatement tout dommage au transporteur.

PRUDENCE

Pour éviter d'endommager le coussin ou les surfaces peintes de la table, n'utilisez pas de couteau ni d'objet pointu pour ouvrir l'emballage. De plus, pour éviter d'endommager la table, soulevez-la uniquement aux points indiqués sur la Figure 3. Ne soulevez pas la table aux autres points indiqués sur les Figures 3 et 4.

1. À l'aide d'une clé plate de 1/2 po ou d'une douille, dévissez la table du patin d'expédition en bois en retirant les six boulons situés sous la base de la table; deux de chaque côté.
2. Retirez la table du patin de transport en la faisant glisser par l'avant. Veillez à soulever la table aux bons endroits, comme indiqué sur la Figure 3. Positionnez la table à l'emplacement souhaité dans la pièce.

AVERTISSEMENT

La table pèse environ 250 kg. Deux personnes ou plus doivent aider à la retirer de la palette d'expédition. De plus, utilisez les techniques de levage appropriées. Le non-respect de ces instructions pourrait entraîner des blessures graves.

3. Retirez le ruban adhésif des étriers (Figure 4). Retirez la glissière du bac de traitement et retirez le ruban adhésif des composants de l'ensemble du bac de traitement. Remettez la glissière du bac de traitement en position de rangement.
4. La puissance électrique nominale de cet appareil est de 230 VCA, 60/50 Hz, 3 A. Le cordon d'alimentation doit être branché sur une prise 230 VCA correspondante.

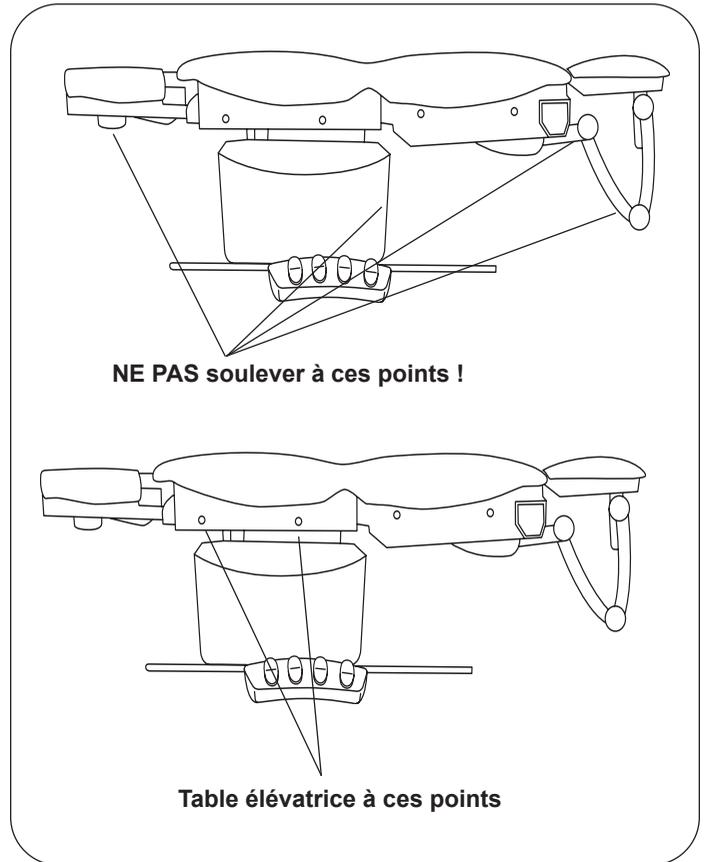


Figure 3. Points de levage de la table

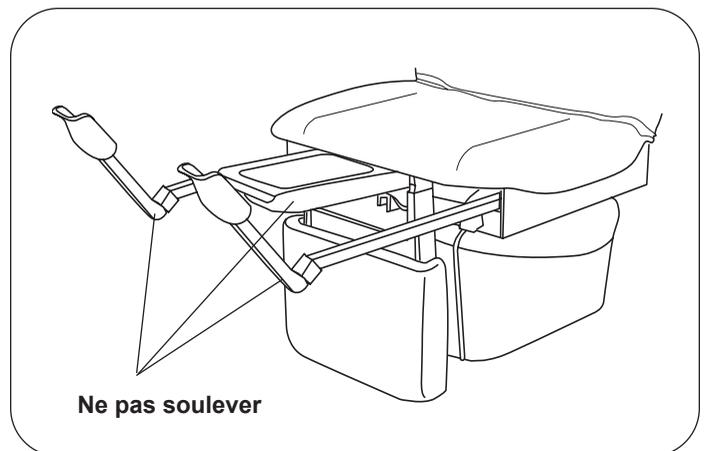


Figure 4. Étriers et bac de traitement

INSTALLATION (SUITE)

Niveler la table

Des patins de mise à niveau (Figure 5) sont situés à six endroits sous la base de la table. Ajustez les six patins pour obtenir une installation solide et plane.

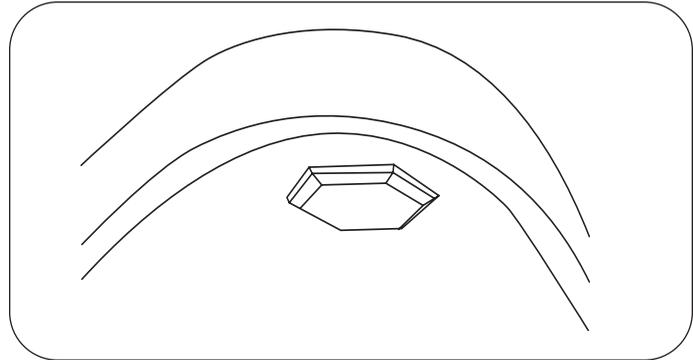


Figure 5. Patin de vis de nivellement (situé sous la table)

Installation de la pédale de commande

1. Retirez la pédale de commande du carton d'expédition.
2. Insérez l'extrémité du cordon dans la prise de la pédale de commande sur la table (Figure 6). Assurez-vous que la languette de la prise du cordon est orientée vers le haut et que la prise est bien en place. Testez le fonctionnement de la pédale de commande.

Installation du cordon d'alimentation

1. Le cordon d'alimentation est vendu séparément.
2. Insérez la fiche femelle du cordon d'alimentation dans la prise de la table (Figure 6). Assurez-vous que les languettes sont alignées et que la fiche est bien en place.

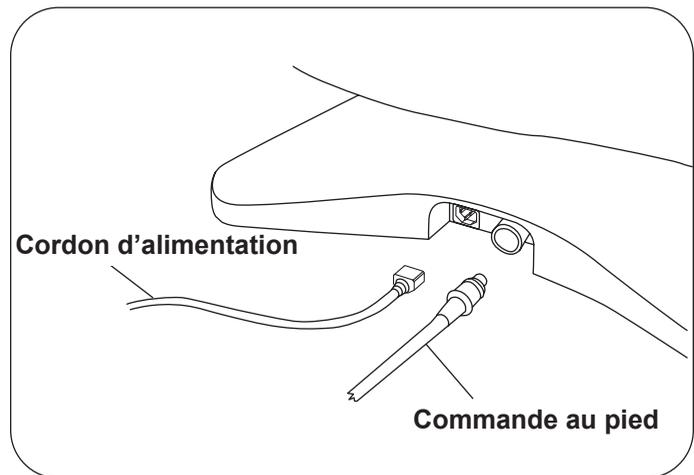


Figure 6. Prises du cordon d'alimentation et du cordon de commande au pied