

INSTALLATION

Aperçu

Effectuez la séquence suivante dans l'ordre lors de la configuration de la table:

- Déballage
- Nivellement de la base
- Installation de la pédale de commande
- Installation du coussin

Déballage

Avis : Inspectez toutes les boîtes et leur contenu pour détecter tout dommage. Signalez immédiatement tout dommage au transporteur.

PRUDENCE

Pour éviter d'endommager le coussin ou les surfaces peintes de la table, n'utilisez pas de couteau ni d'objet pointu pour ouvrir l'emballage. De plus, pour éviter d'endommager la table, soulevez-la uniquement aux points indiqués sur la figure 3. Ne soulevez pas la table aux autres points indiqués sur les figures 3 et 4.

1. À l'aide d'une clé plate de 1/2 po ou d'une douille, dévissez la table du patin d'expédition en bois en retirant les six boulons situés sous la base de la table ; deux de chaque côté.
2. Retirez la table du patin de transport en la faisant glisser par l'avant. Veillez à soulever la table aux bons endroits, comme indiqué sur la figure 3. Positionnez la table à l'emplacement souhaité dans la pièce.

AVERTISSEMENT

La table pèse environ 250 kg. Deux personnes ou plus doivent aider à la retirer de la palette d'expédition. De plus, utilisez les techniques de levage appropriées. Le non-respect de ces instructions pourrait entraîner des blessures graves.

3. Retirez le ruban adhésif des étriers (figure 4). Retirez la glissière du bac de traitement et retirez le ruban adhésif des composants de l'ensemble du bac de traitement. Remettez la glissière du bac de traitement en position de rangement.
4. La puissance électrique nominale de cet appareil est de 115 VCA, 60 Hz, 5,8 A. La fiche de terre à trois broches du cordon d'alimentation de la table doit être branchée sur une prise 115 VCA à trois broches, mise à la terre, non isolée et correctement polarisée.

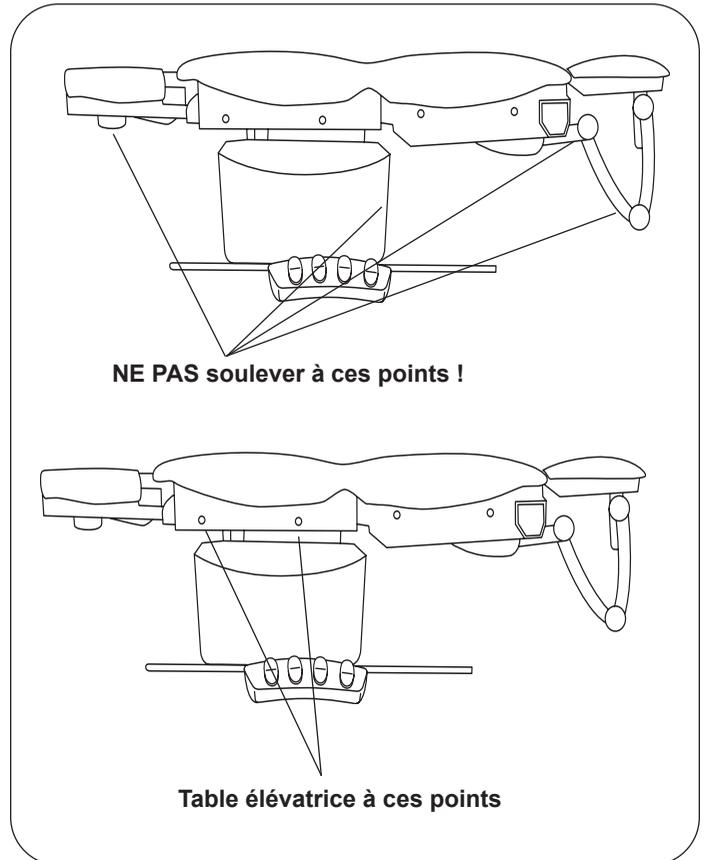


Figure 3. Points de levage de la table

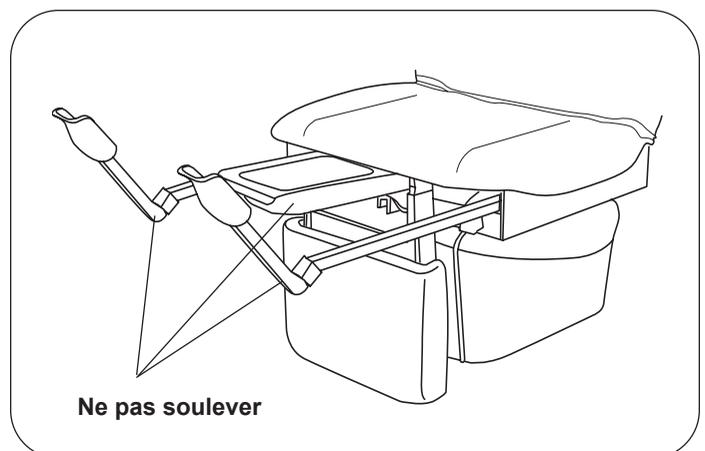


Figure 4. Étriers et bac de traitement

INSTALLATION (SUITE)

Niveler la table

Des patins de mise à niveau (Figure 5) sont situés à six endroits sous la base de la table. Ajustez les six patins pour obtenir une installation solide et plane.

Installation de la pédale de commande

1. Retirez la pédale de commande du carton D'EXPÉDITION.
2. Insérez l'extrémité du cordon dans la prise de la pédale de commande sur la table (Figure 6). Assurez-vous que la languette de la prise du cordon est orientée vers le haut et que la prise est bien en place. Testez le fonctionnement de la pédale de commande.

Installation du coussin

L'ensemble de coussin comprend: un carénage et un coussin d'appui-tête, un coussin d'assise/dossier et un coussin de repose-jambes.

HOUSSE ET COUSSIN D'APPUI-TÊTE

1. Soulevez le dossier de manière à ce que le haut de l'appui-tête soit à une hauteur de travail confortable.
2. Alignez les trous du coussin d'appui-tête, du carénage et de la fixation de l'appui-tête. Assurez-vous que le coussin est bien centré sur le carénage. Fixez avec les six vis fournies.

COUSSIN D'ASSISE/DOSSIER

1. Se référer à la *Opération* section du manuel et positionnez la table de manière à ce que le siège, le dossier et le repose-jambes soient à plat (en position horizontale).
2. Placez le coussin d'assise/dossier sur la table, l'extrémité courbée vers l'appui-tête et l'extrémité droite vers le repose-jambes. Ajustez le coussin de manière à ce que l'extrémité droite dépasse d'environ 10 cm du cadre du siège.
3. Appuyez légèrement au milieu du coussin et déplacez-le vers l'appui-tête jusqu'à ce que les six tiges situées sous le coussin s'insèrent dans les six fentes du cadre du siège. Tirez légèrement au milieu du coussin pour vous assurer que les tiges sont bien enclenchées dans les fentes.
4. Alignez les deux trous filetés situés à l'extrémité de l'appui-tête du coussin avec les deux trous du cadre. Fixez avec les deux vis fournies.
5. Alignez les deux trous filetés situés à l'extrémité du repose-jambes du coussin avec les deux trous du cadre. Fixez-le avec les deux vis fournies.

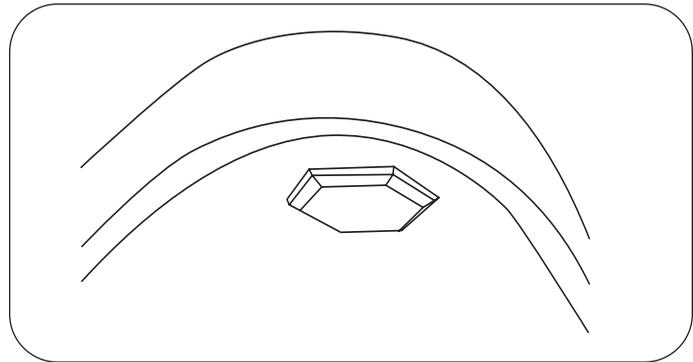


Figure 5. Patin de vis de nivellement (situé sous la table)

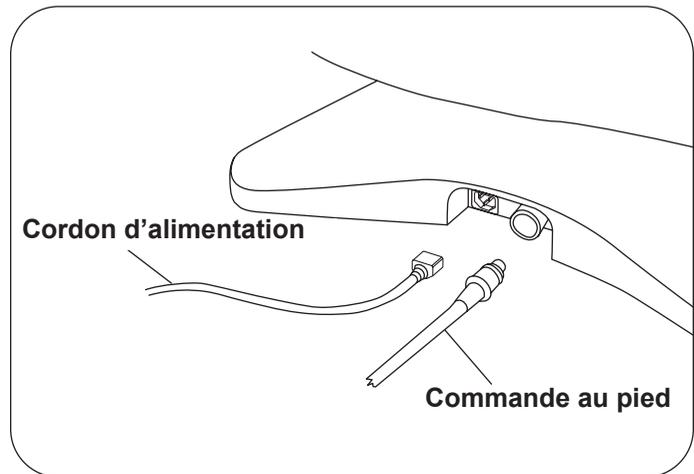


Figure 6. Prises du cordon d'alimentation et du cordon de commande au pied

COUSSIN REPOSE-JAMBES

1. Placez le repose-jambes à l'horizontale. Relevez la table au maximum.
2. Alignez les trous du coussin du repose-jambes et de la plaque du repose-jambes, puis fixez-les avec les six vis fournies.